

# Guttasolv

Guttaperkan liuotin

CE 0459

## Koostumus

Eukalyptoli

## Ominaisuudet

Liuottaa guttaperkkaa.

## Käyttöaiheet

Guttaperkkapäänastan sovittamiseen, kun juurikanavan täyttö tehdään lateraalikondensaatiotekniikalla. Uusintahoitoon, kun juurikanava on täytetty guttaperkalla käyttäen kondensaatiotekniikkaa.

## Käyttöohjeet

### ■ PÄÄNASTAN SOVITTAMINEN (lateraalikondensaatio)

Liuotin pehmentää juurikanavan täyttöä varten asennettavan päänastan pinnan siten, että se mukautuu täydellisesti juurikanavan epätasaisuuksiin ja muotoihin.

Aluksi hammaslääkäri valitsee sopivan päänastan juurikanavan tyypin ja koon mukaan. Nastan apikaalinen pää kastetaan liuottimeen.

Nasta viedään kanavaan koko työskentelypituudelle kevyellä ylös- ja alas pumpppaavalla liikkeellä.

Tämän jälkeen nasta vedetään ulos kanavasta ja peitetään tiivistysaineella.

Tiivistysaine viedään apeksiin asettamalla nasta takaisin paikalleen kevyellä pumpppaavalla liikkeellä.

Lopuksi nasta tiivistetään liuottimella voidellulla sormitappaimella lateraalisesti.

### ■ UUSINTAHOITO:

Vie kaksi liuotintippaa pulpaonteloon. Poista sitten juurikanavan hoitoon tarkoitettua käsi-instrumenttia käyttäen pehmennyttä guttaperkkaa, kunnes instrumentti saavuttaa apikaalisen foramenin.

Lisää juurikanavaan aika ajoin hieman liuotinta ja huuhtelee välillä natriumhypokloriitilla.

## Erityiset varoitukset ja käytön varotoimet

Syttyvää.

Eristettävä sytytyslähteistä – Tupakointi kielletty.

Ei saa niellä.

## Säilytys

Säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessaan huoneenlämmössä suojattuna valolta ja kosteudelta.

## Pakkaus

15 ml:n pullo.

***Vain hammaslääketieteen ammattilaisten käyttöön.***

SEPTODONT – 58, Rue du Pont de Créteil  
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex, France  
puh. +33 1 49 76 70 00

