

ORBIS GOLDEN ONE

Nopeaa, turvallista ja ennakoitavaa juurihoitoa

Orbis Golden One -juurihoitojärjestelmässä käytetään vain yhtä kertakäyttöistä viilaa juurikanavan muotoiluun, mikä takaa yksinkertaisen ja helpon työnkulun sekä entistä nopeamman juurihoidon. Kertakäyttöinen juurihoitoneula vähentää infektioiden ja ristikontaminaation riskejä. Yksi viila riittää useimmiten juurikanavan lopulliseen avaamiseen.




ORBIS



ORBIS GOLDEN ONE -JUURIHOITO-JÄRJESTELMÄN EDUT:

- Lämpökäsitelty neula on erittäin joustava.
- Steriilipakutatut kertakäyttöiset neulat pienentävät neulan katkeamisen sekä kontaminaation riskiä.
- Juurihoitoneula seuraa kanavan muotoa semiaktiivisen kärjen ansiosta.
- Saatavana sopiva viila jokaiseen indikaatioon: neljä erilaista viilaa kolmessa eri pituudessa.
- Viilan multikoonisuus lisää viilan joustavuutta ja säästää siten hammaskudosta.
- Viilan lämpökäsittely vahvistaa viilaa ja pienentää viilan katkeamisriskiä.
- Orbis Golden One -viilaa käytetään resiproktiivisessa käsikappaleessa WaveOne -ohjelmoinnilla.
- Suunnikkaan muotoinen poikkileikkaus irrottaa hyvin preparointijätettä ja estää viilaa juuttumasta juurikanavaan liian tiukasti.

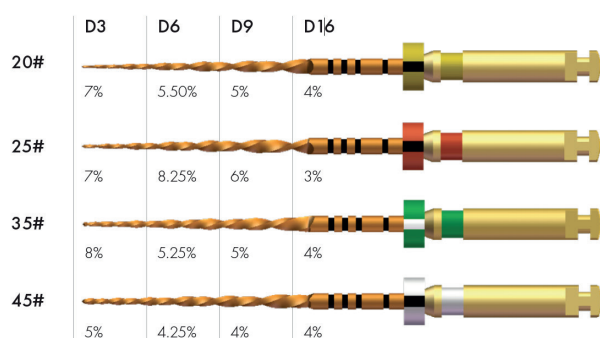

VAIVATON TYÖNKULKU:

Ennen juurihoidon aloitusta hampaasta otetaan röntgenkuva ja hammas avataan koronaalisesti. Liukupolku työskentelypituuteen preparoidaan esimerkiksi koon 10 käsiviilalla ja jatketaan vielä koolla 15.

- Aloita juurikanavan preparointi aina primary-viilalla (punainen 25/7) pienillä edestakaisilla liikkeillä, n. 1–3 mm kerrallaan.
- Jatka preparointia primary-viilalla 2–3 kertaa suurentaen juurikanavaa koronaalisesti kaksi kolmasosaa.
- Jatka preparointia primary-viilalla 1–2 vaiheessa työskentelypituuteen. Ota viila pois juurikanavasta, kun työskentelypituus on saavutettu, jotta kanava ei laajene liikaa. Tarkista viilan kierteet: muotoilu on valmis, jos viilan kierteissä on preparointijätettä.
- Jos primary-viila ei liiku juurikanavassa eteenpäin, käytä keltaista small-viilaa ja liikuta se yhdessä tai useammassa vaiheessa työskentelypituuteen. Käytä tämän jälkeen vielä myös primary-viila työskentelypituudessa.
- Jos primary-viila menee työskentelypituuteen ilman vastusta, juurikanavan preparointi voidaan viimeistellä vihreällä medium- tai valkoisella large-viilalla.
- Huuhtelee juurikanavaa perusteellisesti jokaisen neulanvaihdon yhteydessä. Suosittelemme kofferdamin käyttöä juurihoidossa. Tutustu huolellisesti käyttämiäsi tuotteiden käyttöohjeisiin.
- Orbis Golden One -viiloja käytetään endomoottorissa WaveOne-ohjelmassa.

Orbis Golden One, keltainen (20/07)

Tuotekoodi	Tuote
MD167015	Orbis Golden One neula Small 20.07 21 mm, keltainen, 6 kpl
MD167016	Orbis Golden One neula Small 20.07 25 mm, keltainen, 6 kpl
MD167017	Orbis Golden One neula Small 20.07 31 mm, keltainen, 6 kpl
MD167007	Orbis Golden One paperinasta Small, 20 x 5 kpl
MD167011	Orbis Golden One guttaperkkanasta Small, 60 kpl

Orbis Golden One, punainen (25/07)

Tuotekoodi	Tuote
MD167018	Orbis Golden One neula Primary 25.07 21 mm, punainen, 6 kpl
MD167019	Orbis Golden One neula Primary 25.07 25 mm, punainen, 6 kpl
MD167020	Orbis Golden One neula Primary 25.07 31 mm, punainen, 6 kpl
MD167008	Orbis Golden One paperinasta Primary, 20 x 5 kpl
MD167012	Orbis Golden One guttaperkkanasta Primary, 60 kpl

Orbis Golden One, vihreä (35/06)

Tuotekoodi	Tuote
MD167021	Orbis Golden One neula Medium 35.06 21 mm, vihreä, 6 kpl
MD167022	Orbis Golden One neula Medium 35.06 25 mm, vihreä, 6 kpl
MD167023	Orbis Golden One neula Medium 35.06 31mm, vihreä, 6 kpl
MD167009	Orbis Golden One paperinasta Medium, 20 x 5 kpl
MD167013	Orbis Golden One guttaperkkanasta Medium, 60 kpl

Orbis Golden One, valkoinen (45/05)

Tuotekoodi	Tuote
MD167027	Orbis Golden One neula Large 45.05 21mm, valkoinen, 6 kpl
MD167028	Orbis Golden One neula Large 45.05 25 mm, valkoinen, 6 kpl
MD167029	Orbis Golden One neula Large 45.05 31 mm, valkoinen, 6 kpl
MD167010	Orbis Golden One paperinasta Large, 20 x 5 kpl
MD167014	Orbis Golden One guttaperkkanasta Large, 60 kpl

