




One System Basic

Pyyhepakkaus

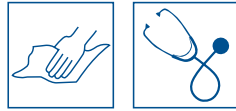

Korkean hygienian tiloihin soveltuva desinfektioaineella täytettävä kertakäyttöinen pyyhepakkaus.

Käyttökohteet

Välinehuolto, leikkausosastot, toimenpidehuoneet ja poliklinikat. Vuodeosastoilla, hammashuollon pintahygieniaan, neuvoloissa ja muissa terveydenhuollon toimipisteissä.

Yleisesti tiloissa, joissa pintadesinfektion tarve on usein toistuva.

Ammattikäyttöön.

Tuoteominaisuudet

Hygieeninen, kertakäyttöinen pussipakkaus sisältää kuitukangaspyyherullan, jossa on 120 kertakäyttöistä, tukevaa pyyhettä (repäisyreijitys). Käyttövalmiilla desinfektioaineella kostutettuina pyyhkeet ovat tutkitusti tehokkaita jopa 28 vrk kostutuksen jälkeen. Synteettinen kuitukangas vapauttaa desinfektioaineen ja säilyttää tuotteen desinfektioitehon. Pyyhekoko 17,5 cm x 36 cm. Pakkauksessa on sanki, joka helpottaa käyttövalmiin pakkauksen kuljetusta.

Easydes Pesevän pintadesinfektioaineen ja Erisan Des Desinfektioaineen teho ja säilyvyys One System Basic-ratkaisussa on todennettu EN 16615 –testillä lähtötilanteessa ja 28 vrk kuluttua. Myös Klorilli Erikoisdesinfektioaineen ja Tevan Panox 200 Desinfektioaineen kanssa käytettäessä käyttöaika on 28 vrk.

Käyttö- ja annostusohje

Avaa pakkauksen kansi. Poista suojaava sisäkansi ja pyyhkeiden repäisyruun peittävä suojus. Kaada 1,2 - 2,5 l käyttövalmista desinfektioaineliuosta pyyherullan päälle ja anna tasaantua 15 min. Merkitse käyttämäsi desinfektioaineen tiedot, päiväys ja täyttäjän tunnistetiedot pakkaukseen. Nosta pyyherullan keskimäinen, kohollaan oleva pyyhe repäisyaukkoon, näin saat pakkauksesta aina yhden pyyhkeen kerrallaan. Käytä suojakäsineitä desinfektioaineita käyttäessäsi.

Valmistusmaa

SAKSA

Pakkauskoko / Tuotekoodi

Myyntierä

Tuotekoodi

GTIN

4 x 120 pyyhettä

8288

4260241964004

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.com tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.