

VOCO

Perfect Bleach Office+



0482

Vastaanotolla tapahtuva valkaisumenetelmä

Käyttöohjeet

Tuotekuvaus:

Perfect Bleach Office+ on hampaiden valkaisugeeli ja tarkoitettu yksinomaan hammaslääkärin vastaanotolla tapahtuvaan käyttöön. 4:1-kokosuoruko sisältää 5 g (4 ml) materiaalia. Iteestään aktivoituvan ruiskun ammustulen aikana, perusosa base ja aktivaattori sekoittuvat 35% vetyparoksidiin.

Indikaatio:

Perfect Bleach Office+ soveltuu yksittäisen tai useamman värjäntymisen, elävien tai juurihoitettujen hampaiden valkaisuun. Valkaisu onnistuu riippuen hampaan luonnollisesta värjäytymisestä sekä värjäntymisen voimakkuudesta ja sen syystä. Valkaisu on mahdollista organismita alkuperäisellä omaavien värjäytymisen, jotka johtuvat yleensä seuraavista syistä:

- ikääntymisestä johtuva hampaiden värjäntyminen
- ruokavaliosista johtuva värjäntyminen (kavvi, tee, tupakka, punaviini jne.)
- lääkityksestä johtuva värjäntyminen (mm. tetrasykliini)

Epäröidessäsi alkuperäis olevat värjäytymiset, kuten amalgaamin ainesosat (hopea) eivät vaaleene eikä myöskään restauroitot/palkat.

Kontraindikatio:

- Raskauden tai imetyksen aikana
 - Alle 14-vuotiaat potilaat
 - Henkilöt, jotka ovat allergisia jollekin materiaalin ainesosille
 - Potilaat, jolla on parodontiitti
 - Potilaat, jolla on paljastuneet dentiniitit, välilliset täyttyt tai hoitamaton karies
 - Yhlerakettipotilaat
- Keskivälit hoito, jos potilas kokee liiallista kipua!

Käyttötapa:

Hoitomenettelyn valmistelu:

• Ammatillinen puhdistus postistaakseen hammaskiven, primälisten koritamiinimien ja polkkavuudet. Selvitä värjäntymisen laatu ja voimakkuus ja arvio milaista valkaisuhoitoa tarvitaan.

• Keskustelee hampaan värjäntymisen syyistä (syistä) potilaan kanssa erityisesti ukosista syistä).

• Kerro potilaalle vaihtoehtojen yksityiskohdista, riskeistä ja hattaväikutuksista. Keskustelee myös mahdollista seuraavista hodoista, kuten täyttelämisestä. Käsittele myös mahdollista hampaiden värjäntymistä, kuten täyttelämisestä tai muista hampaan säilyvistä restauroista, koska ne eivät vaaleine valkaisuhoolla.

• Valjait täyttyt ja restauroitot sekä käsittelemättömät karieslesiot täytyy korjata tai käsitellä ennen valkaisu.

• Määritä värisävy nykytilanteesta ja ota myös valokuvia dokumentointia varten.

• Älä käytä puuhuulusta!

• Potilaan, lääkärin ja avustajien on käytettävä **Perfect Bleach Office+**-käytön aikana. Lääkärin ja hoitajien täytyy myös käyttää käsineitä ja kasvosuojaita. Älä anna **Perfect Bleach Office+**-putkea kosketuksiin ihon, silmien ja limakalvojen kanssa.

Ulkoinen valkaisu:

1. Aseta poskikuopja ja huulireaktori tai vastaava paikalleen.
2. Käytä **LC Dm**ä kenen suojaimiseksi (ks. LC Dm:n käyttöohje).
3. Korferdankumi voidaan myös asettaa paikalleen ennen **LC Dm**in käyttöä.

3. Poista suojakuori, varovasti suikun korkki ja pursota materiaalia uos kunnes sitä tulee tasaisesti ja yhtä paljon molemmista kumusta uos. Sen jälkeen kytkeä silmien sekoituskäski ja ota geelia kärkestä kumies tasavärisiä geimistä maasta: pursuaa uos kättä järkeistä. Hävittä ruskun sekoituskäskistä uos tulut ensimmäinen seos.

4. Annottele **Perfect Bleach Office+**-suoran sekoituskäskistä hampaiden labiaalipintoin 1 - 2 mm pakusuna kerroksia. Hampaiden käytettävä materiaalia voidaan sekoittaa instrumentilla joka vielä minuuttii parantakseen sen tehokkuutta.

5. Anna geelin vaikuttaa hampaan pinnalla n. 10 - 15 min. Ikenen mahdollista ärsyttymistä pitäisi tarkkalla koko toimipiteleen ajan.

6. Iine valkaisugeeli kirurgisella mukallimella.

7. Valheet 4 - 6 voidaan toistaa kahdesti ellei hampmas ole saavuttanut haluttua värisävyä.

8. Kun on saavutettu haluttu valkaisuulos, poista kaikki valkaisugeelin jäämätseet imuroimmi järkeen sekoituskäskiä tai puuvillaväruulla. Huuhtele runsaalla vedellä välittömästi tämän jälkeen.

9. Suje rusku postiaan ensin sekoituskäski ja i kiertä korkki takasin paikolleen ruskuun.

B) Juurihoitettujen hampaiden elävien valkaisu:

1. Ennen valkaisuompeidettä, ota röntgenkuva varmistaakseen että juurikanvääryt on tiivistä suljettu.
2. Ensimmäinen laisena puoan johtavaa suuta ja juurikanvää ja poista huudellisesti jäljellä oleva täyte. Varmista, että pääsy koronalaisten puoan alueen on totu, jota valkaisugeeli vrent onnistuu.
3. Juuriinavattavie täytyy postiaan huudellisesti enintään 2 mm pak-suudella kervialuealueen kenen alapuoletia ja se pitäsi jälkeänpain tiivistä kattaa huudellisesti.
4. Luo kuiva työskentelyalue vakutettavalle hampaalle. Korferdankummi käyttö on suositeltavaa niin kuin lisäsuojaksi mikä vahingossa hengittää tai nileee ennestään vahvaa valkaisuainetta. Ikenen lisäsuojaksi applikoi **LC Dm** käyttöhoitajien mukaisesti.

5. Sen jälkeen, käytännen tyypää sekoituskanyllia intraoraalisen kärien kanssa, täytyä kaviiteetti **Perfect Bleach Office+**-materiaalia (ks. vahe A3), joka pitäsi jättää kaviiteettiin noin 10 - 15 minuutin ajaksi.

6. Varmisteen valkutuksen aikana, kaviiteetti voidaan sulkea sopivalla, tiivillä valkaisualla materiaalla ja potilas voi esimerkiksi odottaa sen vakutus-alkaia odotushuoneessa. Potilaalle on korotettava, että hän ei saa syödä eikä juoda hoidon aikana välikäsen materiaalin ollessa kypsässä, koska se voi joutaa et ototuvien vakusaamisen vuotamisen.

7. Vakutusajan jälkeen, ime huudellisesti valkaisuaine kaviiteetista kirurgisella mukallimella. Huuhtele kaviiteetti kauttaatteen vedellä.

8. Valkaisuainetta lisäämiseksi, väheet 5 - 7 voidaan toistaa kahdesti.

9. Kun hauritu valkaisuhoon on saavutettu, kaviiteetti täytyy huudellisesti huuhtella runsaalla vedellä valkaisugeelin postistaakseen jälkeän.
10. Pimotia kaviiteetti siihen soveltuvalle välikäselä, täyteaineella (esim. lasi-ionomerialle). Täläimen täytye pitäisi oia paikollaan 14 päivän ajan ennen tpuistia tomerpidettä yndistämänuvella.

Hoidon jälkeen:

- Määritä hampaan nykytilanteen värisävy ja ota mahdollisesti vakouva dokumentointia varten.
- Yleisimpiä haitallisia sivuvaikutuksia ovat tilapäiset yllherkyydet käsitelleyllä hampalla ja perodontaalien ärsytys. Nämä oireet häviävät lyhyessä ajassa hoidon päätyttyä.
- Suorita halutessasi hampaan remineralisaatio fluorivalmisteella.
- Hampait voivat hienan tummuu uudeleen ensimäisten viikkojen aikana sen vuoksi hampaansäilyviset täyttyet pitäisi uusia aikaisintaan kaksi viikkokäynteihin jälkeen.
- Normalkaadi värjäytien tai hapaaminen ruokien ja juomien sekä tuotien käyttöä pitäisi välttää vähintään kahden päivän ajan **Perfect Bleach Office+**-materiaalia tenästä tomerpidestä, koska värjäntyminen voi lisätyä.

Verotus/värotoimet:

Perfect Bleach Office+ sisältää vetyparoksidia, kalliumnitraattia, natriumfluoridia, natriumhydroksidia, glykolin johdannaisia, säteutämisainetta ja väriainetta.

Puudas aktivaattori (punaainen komponentti) on syövyttävä ihon. Sekoitettu valkaisugeeli toimii ärsyttävästi joutussaan kosketuksiin ihon, silmien tai suun limakalvoilla.

Jos näin tapahtuu, huuhtele alue välittömästi runsaalla vedellä. Hakeudu myös lääkärin hoitoon jos aineetta on joutunut silmiin. Älä niele (aiheuttaa pahoinvointia ja närästyä). Pidä possea lesten ulottuvilla!

Säilytys:

Säilytä **Perfect Bleach Office+** kylmissä lämpötilassa 2°C - 8°C. Älä säilytä pakastimessa.

Suoja **Perfect Bleach Office+**-suorata auriongonvabita ja kuunnuudella. Pitkäläksävarastointi korkeammissa lämpötiloissa saattaa joskus aiheuttaa kuplien muodostumista geeliin.

Tämä voi johtaa epähomogeeniseen, enemmän nestemäiseen seokseen, erityisesti kaksoisruiskussa olevan materiaalin viimeisellä neljäsosalla. Älä käytä materiaalia tällaisessa tapauksessa.

Älä käytä **Perfect Bleach Office+**-materiaalia viimeisen käyttöpäiväyksen jälkeen.

Tuotteemme on kehitetty hammaslääkärikäyttöön. Toimitamme tuotteiden käyttöä koskevat suulliset ja/tai kirjalliset tiedot ovat käytössämme. Oletetaan, että lääkärit, jotka käyttävät tätä tuotetta, ovat koulutettuja. Antoleiden parhaiden tietojemme mukaisia ja ne eivät ole välttämättä. Toimitamme tiedot tai neuvot eivät vapauta käyttäjää arvioimasta toimitamme tuotteiden soveltuvuutta aiotuun käyttöön. Koska emme voi valokäyttöämme tuotteiden käyttöä, käytäjä on itse täysin vastuussa niiden käytöstä. Takkaamme luonnollisesti valmistetiemme voimassa olevien standardien mukaisesti laadun ja myyntiä sekä jakelua koskevien yleistien sopimusehtoien mukaisuuksien.



Tammblesystem for klinikbleking

Bruksanvisning

Produktbeskrivelse:

Perfect Bleach Office+ er en gel for tæmbleking uført av tæmte på klinik. Den 4:1-doble sproyten inneholder 5 gram (4 ml) materiale. Ved å trykke basen og aktivatoren gjennom den selvaktiverende sproyten, blir materialet blandet til en gel med et hydrogenperoksid innhold på 35%.

Indikasjoner:

Perfect Bleach Office+ er egnet til å bleke single eller flere misfargede vitale eller dentaleste tenner. Graden av suluss på viringen anviser av den naturlige tæmtingen, samt intensiteten av årsketen til misfæringen. Bleking er mulig ved misfæring av organiske årsketer, som vanligvis har oppstått på grunn av følgende:

- adresserelat misfæring av tænen
- misfæring relatert til inntak av mat/drikke (kaffe, the, tobakk, rødvin etc.)
- misfæring relatert til medisinsk bruk (f.eks. tetrasyklin).

Misfæring av horgiske opprinnelse, slik som komponenter fra amalagam (sølv) blir ikke bleket, heller ikke fyllinger.

Kontraindikasjoner:

- Ved graviditet og lactation
- På pasienter yngre enn 14 år
- På pasienter med intoleranse eller allergier mot noen av ingrediensene
- På pasienter som har periosykdommer
- På pasienter med eksponert dentin, manglende fyllingsmarginer eller ubehandlet karies

På pasienter med stor hyposensitivitet behandlingen skal avbrytes dersom pasienten har store plager og smerter!

Applikasjonsmetode:

Forbereidelse til behandling:

- Rens og fjern tæmten, overflatekontaminering godt. Bestem typen og graden av misfæringen, og evaluér om blekebehandling kan utføres.
- Utpor pasienten om årsketen (i tilstingering spesielt esterne årsketen).
- Informer pasienten i detalj om mulighetene, risikoen og virkningene. Informer også om mulige andre behandlingsbehov, slik som skifting av fyllinger eller andre restaureringer, ettersom disse ikke vil bli bleket ved blekeprosessen.

• Dørlige fyllinger og restaureringer og ubehandlet karies skal skiftes eller behandles før blekingen.

• Bestem og dokumenter den nåværende færgen, og ta om mulig fotoer.

Bruk ikke anestetik

Pasienten, behandleren og assistenten skal alle bruke beskyttende briller når **Perfect Bleach Office+** appliseres. Behandleren og assistenten skal også bruke briller og munnbind. **Perfect Bleach Office+** må ikke komme i kontakt med hud, øyne eller væv.

A. Utvendig bleking:

1. Sett på leppebånd eller lignende.
 2. Appliser **LC Dm** for å beskytte gingiva/se bruksanvisning for **LC Dm**).
- Korferdum kan også brukes, derne bør settes på før applisering av **LC Dm**.