


RelyX™ Fiber Post (3D) koot

1


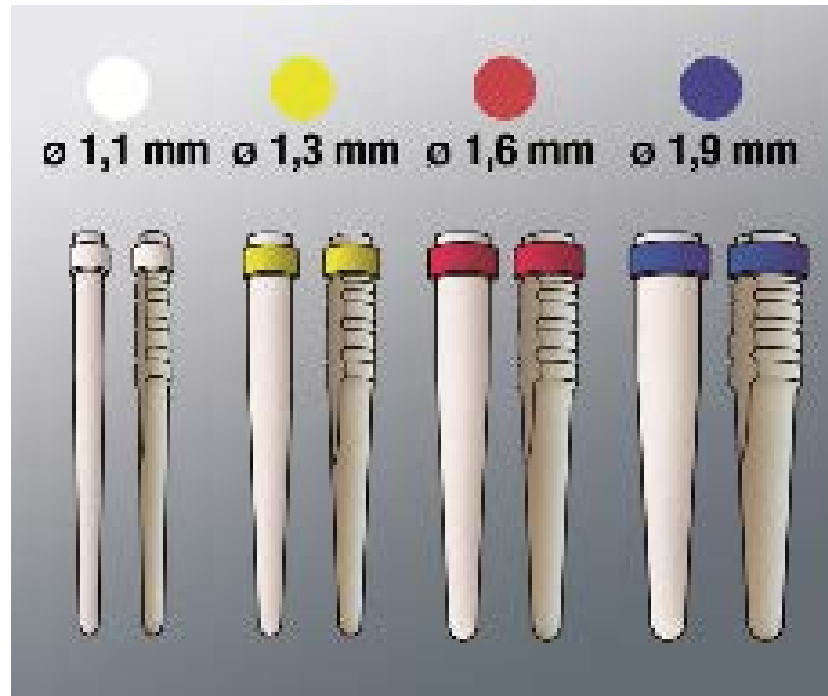


Samat koot = samat porat

RelyX™ Fiber Post 3D- ja RelyX™ Fiber Post-lasikuitunastat : koot ovat samat molemmissa järjestelmissä

Guttaperkan poisto yleisporalla, jonka jälkeen valitaan sopivankokoinen RelyX™ Fiber Post avauspora


2

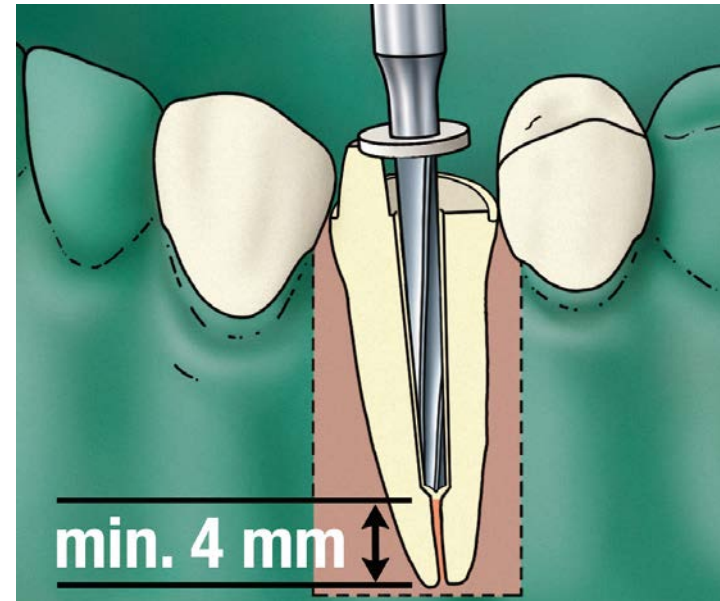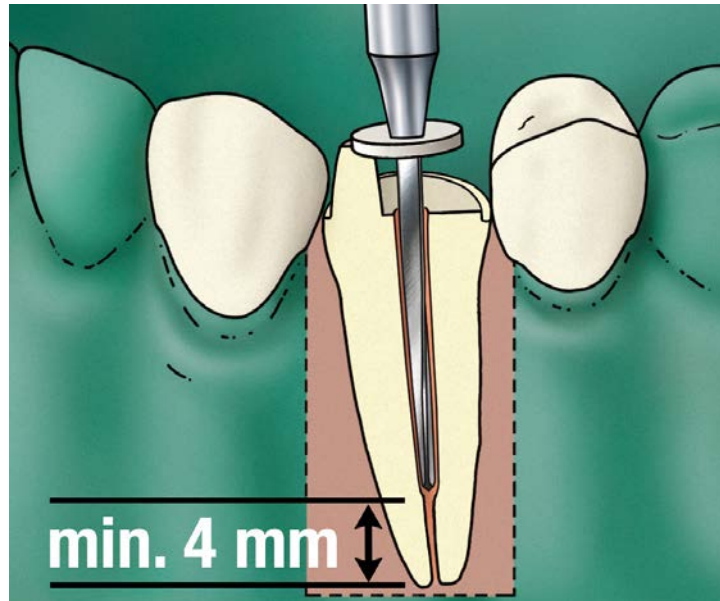

Vinkki: Jätä vähintään 4 mm guttaperkkaa apikaalisesti. Kierrosluku 1000 – 2000 rpm

Sovita valittua RelyX™ Fiber Post 3D –nastaa, jotta voit varmistua halutusta pituudesta


3

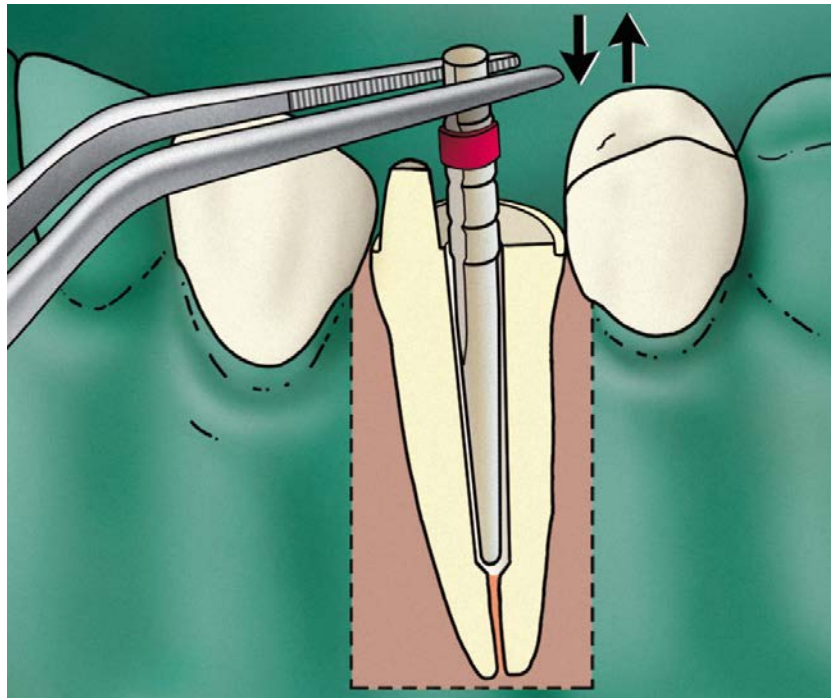

Vinkki: Merkitse katkaisukohta värillisellä kumirenkaalla.

Katkaise nasta suun ulkopuolella


4

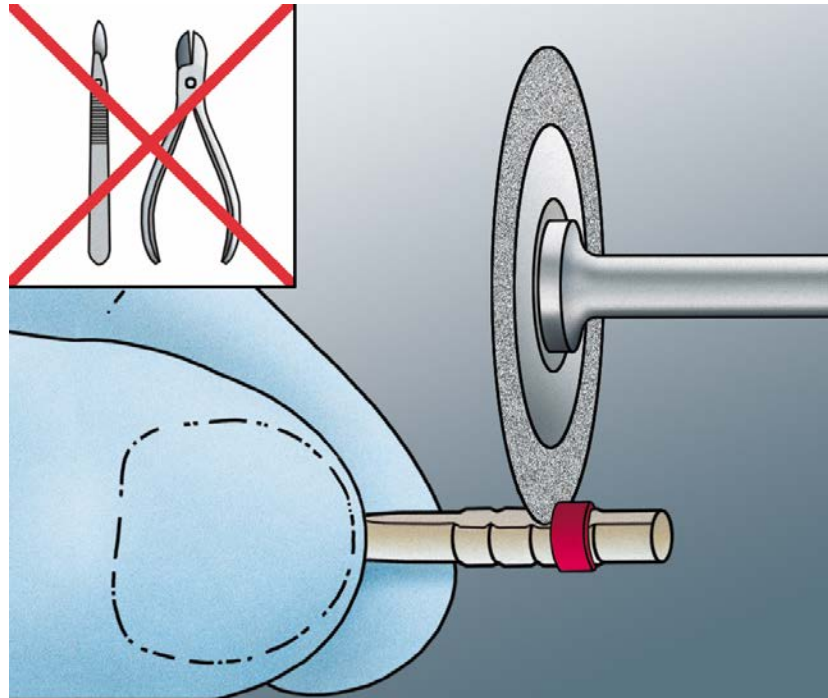

Vinkki: Käytä katkaisuun timanttilaikkaa.

Pyvyhi nasta alkoholilla ja kuivaa ilmapuustilla



5

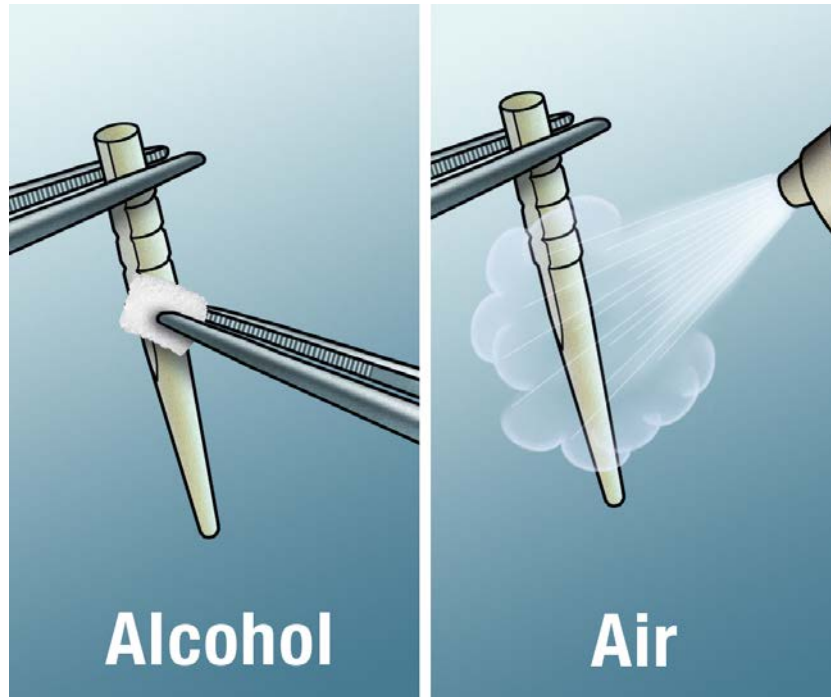

Vinkki: RelyX™ Fiber Post 3D tai RelyX™ Fiber Post -nastoja ei tarvitse esikäsitellä esim. silaanilla.

Puhdista juurikanava natriumhypokloriitilla (2,5 – 5,25%) ja huuhtele huolellisesti vedellä


6

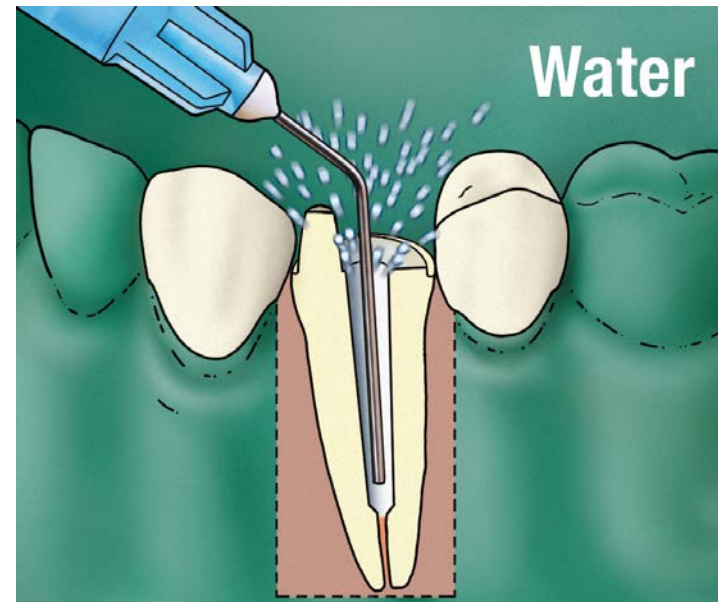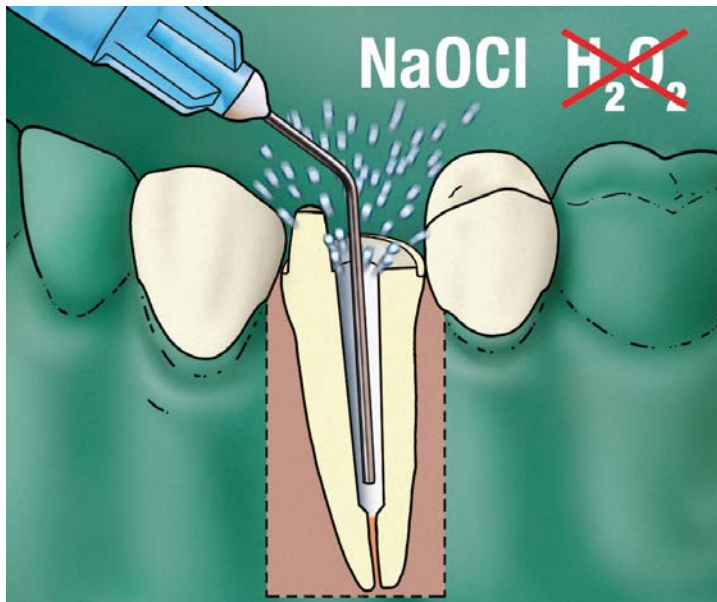

Vinkki: Älä käytä vetyperoksidia, EDTA:ta tai natriumkarbonaattia ennen sementointia.


Kuivaa juurikanava paperinastalla

7

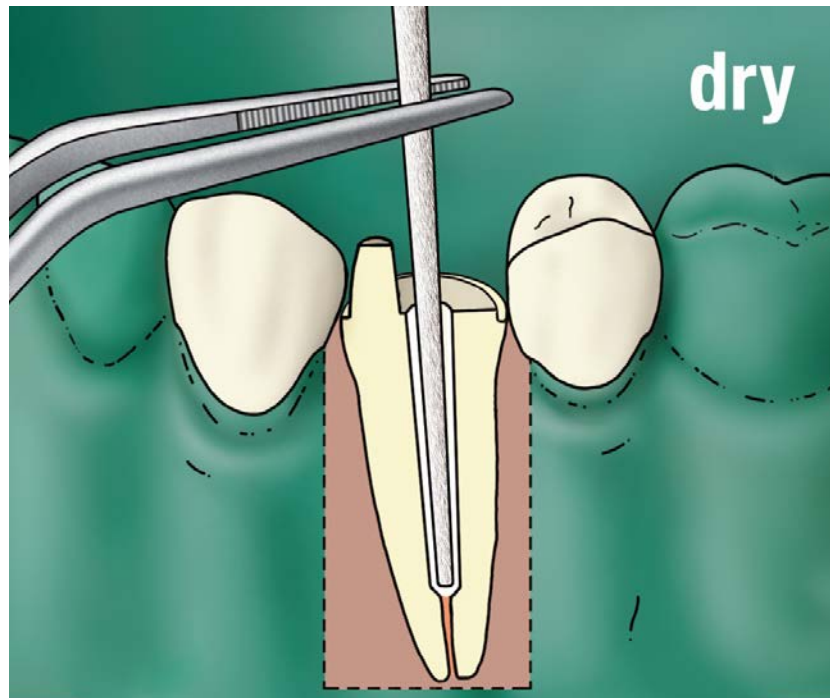

Annostele sementti juurikanavaan endokärjellä


8

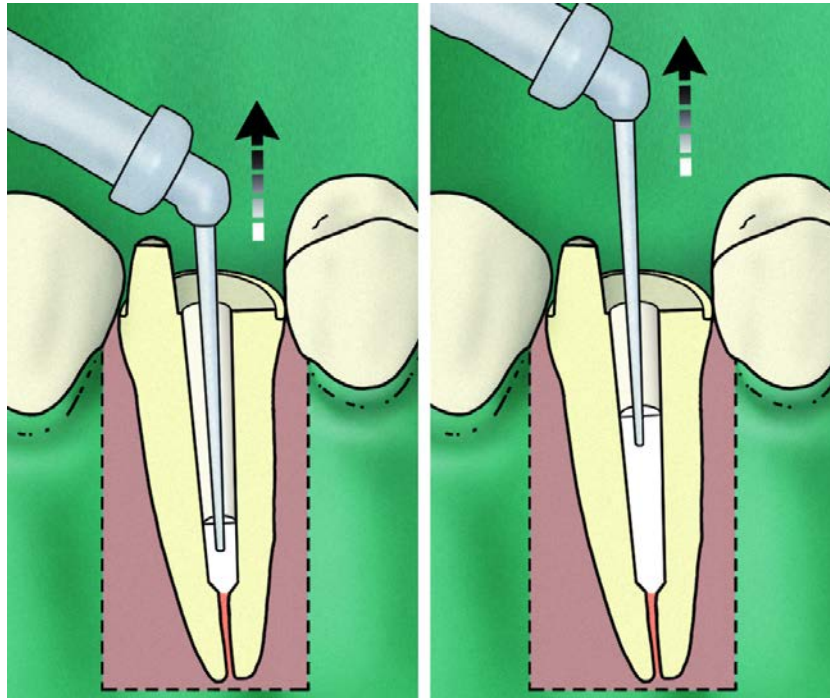

Vinkki: Täytä kanava hitaasti alhaalta ylöspäin pitäen kärkeä koko ajan upoksissa. Näin ehkäiset ilmakehien muodostumista.

Aseta RelyX™ Fiber Post 3D -lasikuitunasta


9

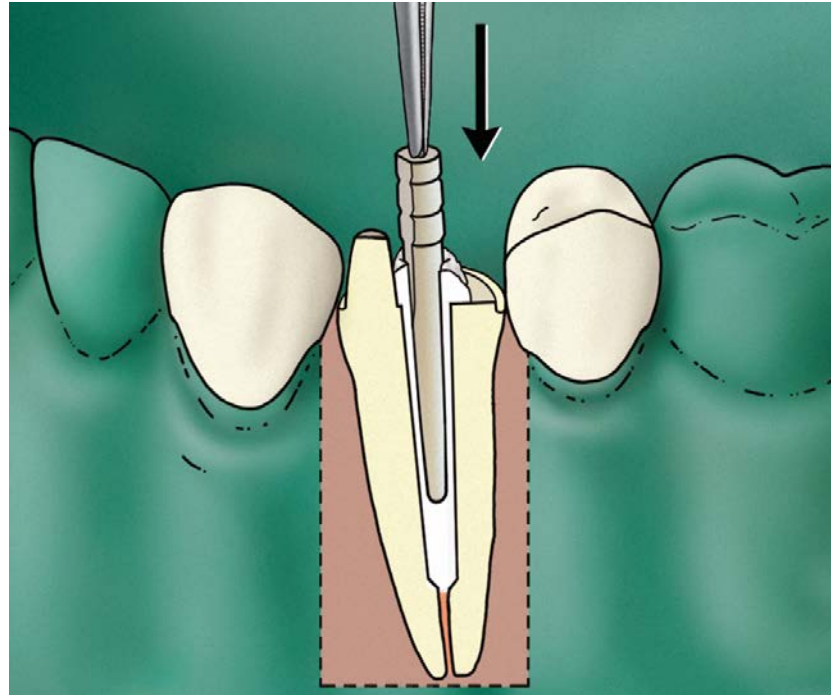

Vinkki: Aseta nasta hitaasti ja varo ylös/alas liikuttelua välttääksesi ilmataskujen muodostumista.

Poista sementtiylimäärät


10

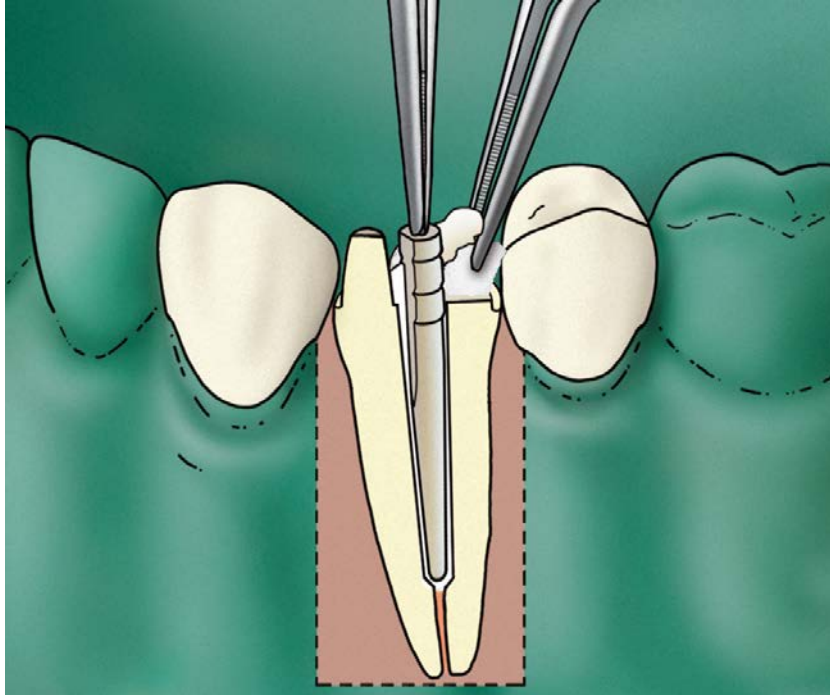

Vinkki: Pidä nastaa paikoillaan ylimäärien poiston ajan. Vaihtoehtoisesti ylimäärät voidaan poistaa 1-2 s pikakovetuksen jälkeen.

Anna sementin kovettua. Kovettuminen voidaan käynnistää LED-valokovettimella.

11

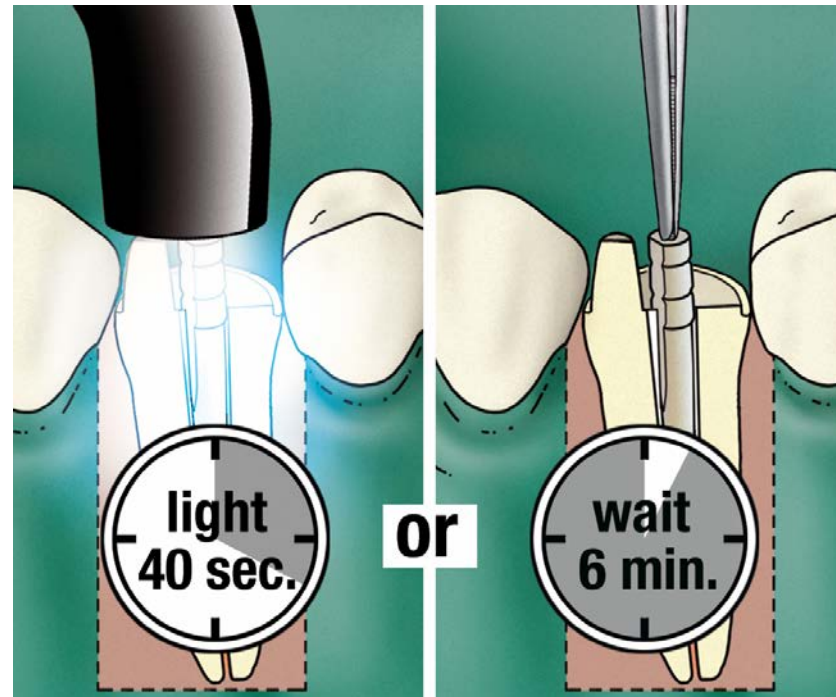

Vinkki: Voit kovettaa nastan läpi Elipar™ Deep Cure tai Elipar™ S10 –valokovettimella parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Vaihtoehtoisesti pidä nastaa paikoillaan kunnes kemiallinen kovettumisaika on kulunut.

Pilarin rakennus: Annostele Scotchbond™ Universal sidosaine nastalle ja hampaalle


12



Vinkki: Hiero sidosainetta 20 sek. koko sidostettavalle alueelle mikroharjalla.

Puustaa väh. 5 sek. Ja valokoveta 10 sek.

13

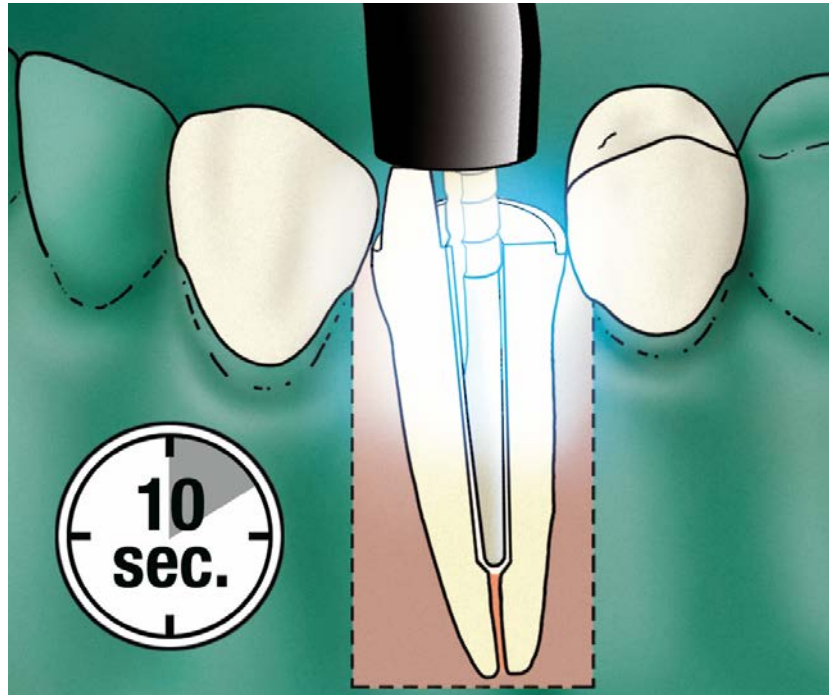

Vinkki: Käytä Elipar™ S10 tai Elipar™ Deep Cure -valokovetinta

Annostele Filtek™ Bulk Fil Posterior täytemateriaali


14



Vinkki: Voit annostella materiaalin maks. 5 mm kerroksissa.

Valokoveta Filtek™ Bulk Fill Posterior

15

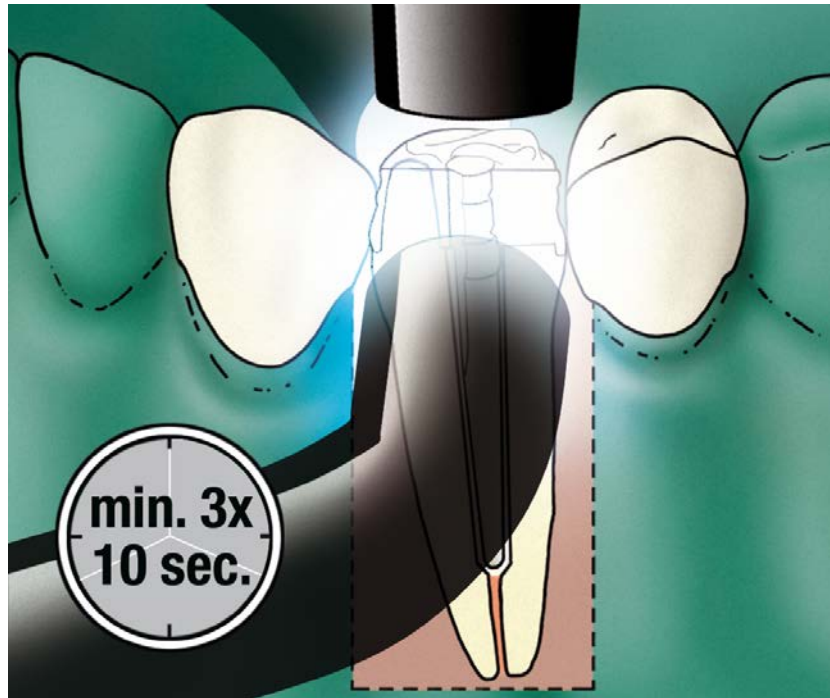

Vinkki: Pyri kovettamaan riittävästi kaikilta pinoilta.

Muotoile ja viimeistelemiseksi pilari

16

