



3M Science.
Applied to Life.™

**3M kuitunastapilarin
rakentaminen.
Onnistu toimenpiteessä.**

3M kuitunastapilarin rakentaminen.

RelyX™ Fiber Post 3D

Toistettava toimenpide – lyhyemmässä ajassa

Me tiedämme: juurihoito ja sitä seuraava täyteen / kruunun valmistus on erittäin monimutkainen toimenpide. Mitä helpommaksi ja yksinkertaisemmaksi toimenpide voidaan saada, sitä parempi se on sekä potilaalle, että hammaslääkärille. 3M tarjoaa ratkaisun tähän ongelmaan. Järjestelmässä on vain muutama tuote ja erittäin vähän työvaiheita, joten se nopeuttaa ja helpottaa työtäsi.

Vain neljä eri työvaihetta

3M kuitunastapilarin rakentaminen ei ainoastaan helpota työtäsi vaan varmistaa sen, että saat saman, lujan lopputuloksen jokaisella kerralla. Tarvitset vain RelyX™ Fiber Post 3D -lasikuitunastat sekä kolme muuta helppokäyttöistä 3M Oral Care -tuotetta: RelyX™ Unicem 2 Automix -sementin, Scotchbond™ Universal -sidosaineen, ja Filtek™ Bulk Fill Posterior -täytemateriaalin.

Jokainen näistä neljästä tuotteesta on kehitetty tekemään työstäsi helpompaa ja tehokkaampaa ja niillä on yksi yhteinen tavoite: Onnistunut toimenpide!

RelyX™ Fiber Post 3D -juurikanavanastoja on saatavilla neljää eri kokoa. Värikoodaus auttaa löytämään nastaa vastaavan poran helposti.



Viisi erikokoista poraa (sis. yhden yleisporan guttaperkan poistoon). Samat porat toimivat myös perinteisten RelyX™ Fiber Post -lasikuitunastojen kanssa.



Vähemmän kliinisiä työvaiheita



Nasta

RelyX™ Fiber Post 3D -lasikuitunasta jossa on uusi retentoiva koronaalinen osa

RelyX Fiber Post 3D luottaa edeltäjänsä, RelyX Fiber Post -lasikuitunastan, kahdeksan vuoden kliiniseen onnistumiseen. Nyt olemme kehittäneet siitä uuden, parannetun version:

- Parempi mekaaninen retentio pilarin rakennusmateriaaleihin uuden makroretention ansiosta.
- Luja sidos sementin ja nastan välille mikrokarhennetun pinnan ansiosta ilman erillistä silanointia. Poistetaan pallukka “erillistä silanointia” edestä. Nastan sijaintia on helpompi kontrolloida, parannetun röntgenkontrastin ansiosta.
- Alhaisempi juurifraktuurariski dentiinimäisen elastisuuden vuoksi.
- Esteettisempi kuin metallinasta.



Sementti




RelyX™ Unicem 2 Automix itsekiinnittyvä muovisementti

RelyX Unicem 2 Automix -sementti säästää aikaasi koska sinun ei tarvitse etsata ja sidostaa ennen sementointia.

Automix-ruisku ja endo-kärjet mahdollistavat helpon annostelun suoraa juurikanavaan.

Yksi työvaihe – ei ilmakuplia.

a ja tuotteita

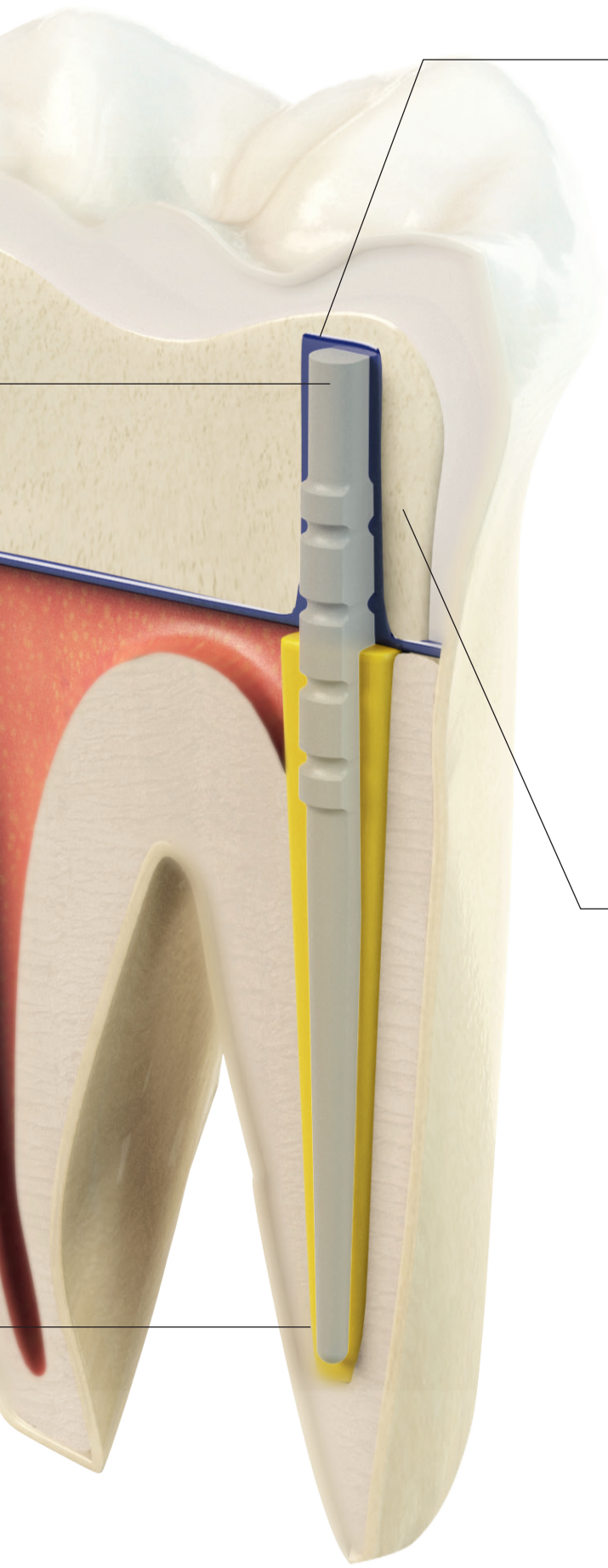

Sidosaine

Scotchbond™ Universal sidosaine

Scotchbond Universal sidosaine varmistaa pilarimateriaalin lujan kiinnittymisen sekä nastaan että ympäröivään hammaskudokseen – ilman erillisiä esikäsitteilyaineita.

Yksi työvaihe – valmis!



Pilarin rakennus

Filtek™ Bulk Fill Posterior -täyttemateriaali

Filtek Bulk Fill Posterior soveltuu erinomaisten käsittely- ja lujuusominaisuuksiensa takia hyvin myös pilarimateriaaliksi. Erityisesti tilanteissa joissa nastan lisäksi täytyy täyttää laajoja alueita. Uusi pitkäkärkinen kapseli varmistaa kuplattoman annostelun. Materiaalia on helppo muotoilla ja se adaptoituu hyvin sekä nastaan että hampaan pinnalle. Pilarin muotoilu on myös helppoa, koska kovetettu materiaali hioutuu dentiinin tavoin.


Maksikerrospaksuus 5 mm.

Sementti

RelyX™ Unicem 2 Automix -sementti annostellaan suoraan juurikanavaan endo-kärjen avulla.


KLIIININEN VINKKI:

Suosittelomme 3M™ ESPE™ Astringent -retraktiopastaa tilanteissa joissa halutaan estää nesteiden nouseminen ientaskusta toimenpiteen aikana.

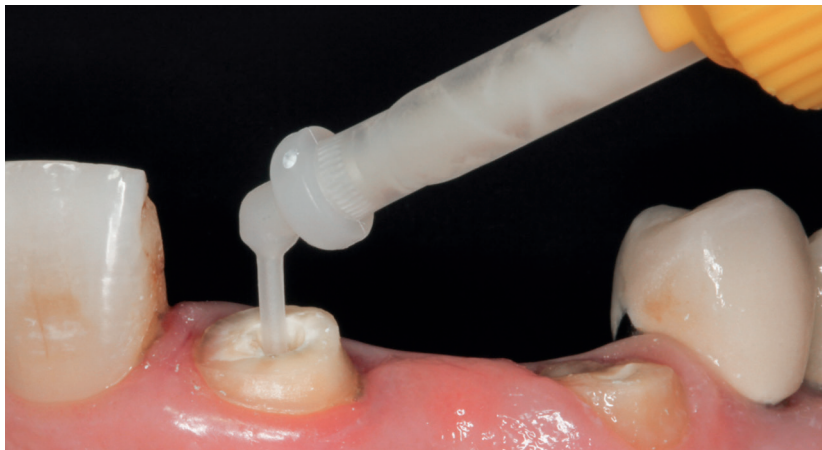


Nasta

RelyX™ Fiber Post 3D lasikuitunasta asetetaan juurikanavaan. Erillistä esikäsitelyä ei tarvita.

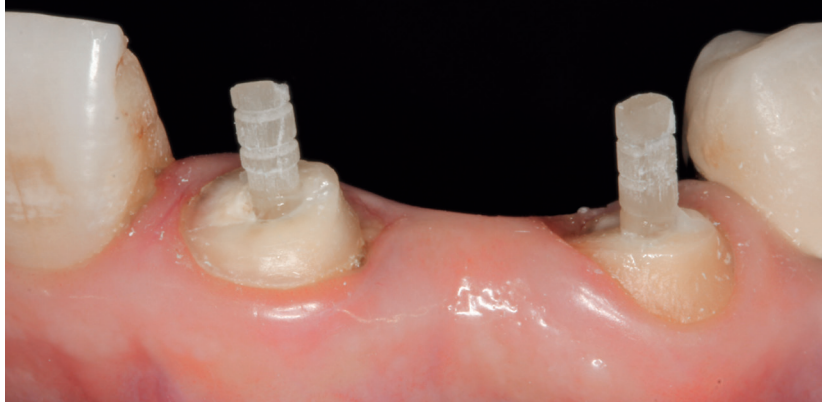

Sidosaine

Annostellaan Scotchbond™ Universal -sidosaine. Erillisiä primereitä ei tarvita.

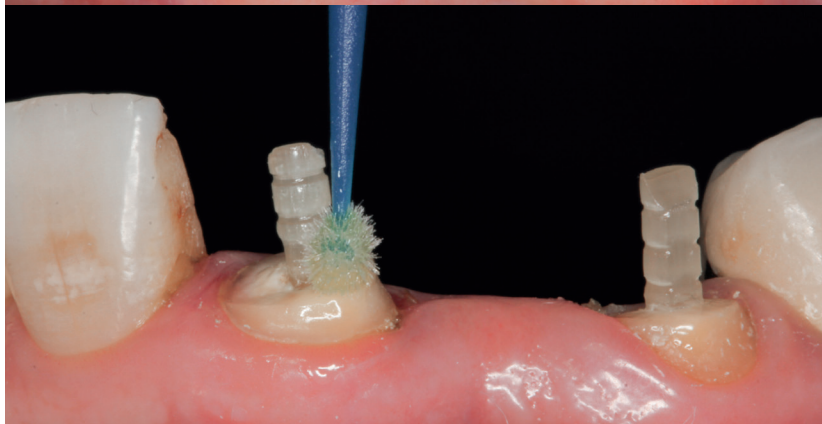

Pilarin rakennus

Pilari rakennetaan nastan ympärille Filtek™ Bulk Fill Posterior -täyttemateriaalista.



Pilarit hionnan jälkeen



Tilaustiedot

Tilausnro. Sisältö

RelyX™ Fiber Post 3D -lasikuitunasta

56957	Peruspakkaus 20 nastaa, koot 0, 1, 2, 3 (5 nastaa / koko), 5 poraa, koot 0, 1, 2, 3, yleispora (1 pora / koko)
56958	Kokeilupakkaus RelyX™ Unicem 2 Automix -sementillä 10 nastaa, koot 1, 2 (5 nastaa / koko), 3 poraa, koot 1, 2, yleispora (1 pora / koko), 1 RelyX™ Unicem 2 Automix ruisku A2 – 8.5 g, 10 sekoituskärkeä, 10 endo-kärkeä
56960	Pilarin rakennuspakkaus RelyX™ Unicem 2 Automix 1 kokeilupakkaus RelyX™ Fiber Post 3D/RelyX™ Unicem 2 Automix sementti 20 kaps. Filtek™ Bulk Fill Posterior täytemateriaalia A3 – 0.2 g kaps. 1 pullo Scotchbond™ Universal sidosaine – 5 ml

Nastat ja porat - refillit

56948	10 nastaa, koko 0 (1.1 mm halk.), valkoinen
56949	10 nastaa, koko 1 (1.3 mm halk.), keltainen
56950	10 nastaa, koko 2 (1.6 mm halk.), punainen
56951	10 nastaa, koko 3 (1.9 mm halk.), sininen
56873	1 pora, koko 0 (1.1 mm halk.), valkoinen
56864	1 pora, koko 1 (1.3 mm halk.), keltainen
56865	1 pora, koko 2 (1.6 mm halk.), punainen
56866	1 pora, koko 3 (1.9 mm halk.), sininen
56867	1 yleispora

RelyX™ Unicem 2 Automix -itsekiinnittyvä sementti

Refillit

56846	Sävy A2 Universal 1 ruisku – 8.5 g, 15 sekoituskärkeä (normaali), 5 sekoituskärkeä (iso), 5 endo-kärkeä
56847	Sävy A3 Opak 1 ruisku – 8.5 g, 15 sekoituskärkeä (normaali), 5 sekoituskärkeä (iso), 5 endo-kärkeä
56848	Sävy Translucent 1 ruisku – 8.5 g, 15 sekoituskärkeä (normaali), 5 sekoituskärkeä (iso), 5 endo-kärkeä

Tarvikkeet – sekoituskärjet

56851	30 sekoituskärkeä (normaali)
56919	15 sekoituskärkeä (iso), 15 endo-kärkeä

Tilausnro Sisältö

Scotchbond™ Universal -sidosaine

41254	Peruspakkaus 1 pullo Scotchbond™ Universal -sidosaine – 5 ml, 50 sekoitusmaljaa, 50 mikroharjaa, 1 etsaushapporuisku – 3 ml, 25 annostelukärkeä etsaushapporuiskuun
41258	Refilli 1 pullo Scotchbond™ Universal -sidosaine – 5 m

Filtek™ Bulk Fill Posterior -täytemateriaali

Refilli	Tilausnro.	Tilausnro.
Sävy	Ruisku sis. 1 ruisku – 4 g	Kapseli sis. 20 kapselia – 0.2 g /kaps.
A1	4863A1	4864A1
A2	4863A2	4864A2
A3	4862A3	4864A3
B1	4863B1	4864B1
C2	4863C2	4864C2

