

SUOMI KÄYTTÖOHJEET

I. JOHDANTO

CLEARFIL DC Activator -aktivaattori aktivoi CLEARFIL BONDING SYSTEMin (esim. CLEARFIL SE BOND 2) kaksoiskovettumismekanismiin. Tuote sekoitetaan BONDin kanssa, ja sitä voidaan käyttää kaksoiskovettuvien tai itsekovettuvien yhdistelmämuovityöaineiden, sementtien tai pilarin rakennusmateriaalien kanssa.

II. KÄYTTÖTARKOITUKSET

CLEARFIL BONDING SYSTEMin kanssa käytettynä tuote on tarkoitettu seuraavaan käyttöön:

- [1] Pilarin rakennukseen käytettäessä itsekovettuvia tai kaksoiskovettuvia pilarinrakennusmateriaaleja
- [2] Kiinnitys yhdessä itsekovettuvien tai kaksoiskovettuvien yhdistelmämuovisementtien kanssa

III. KONTRAIINDIKAATIOT

Potilaat, joilla on aiemmin esiintynyt yliherkkyyttä metakrylaattimonomeerien suhteen

IV. TURVATOIMENPITEET

1. Varotoimenpiteet

- 1. Tämä tuote sisältää aineita, jotka saattavat aiheuttaa allergisen reaktion. Älä käytä tuotetta potilailla, jotka ovat allergisia metakrylaattimonomeereille tai muille ainesosille.
- 2. Jos potilaalla syntyy yliherkkyyssreaktio, esimerkiksi ihottuma, tulehduksen oireet, haavaumat, turvotus, kutina tai tunnottomuus, lopettakaa tuotteen käyttö ja kääntykää lääkärin puoleen.
- 3. Tuotteen käytössä on noudatettava varovaisuutta, ettei sitä joudu iholle tai silmiin. Ennen käyttöä potilaan silmät on suojattava mahdollisilta roiskeilta peiteliinalla.
- 4. Jos tuotetta joutuu kosketuksiin ihmisen kudosten kanssa, toimi seuraavasti:
 - < Jos tuotetta pääsee silmiin >
Huuhtelee silmä välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
 - < Jos tuotetta pääsee iholle tai suun limakalvoille >
Pyyhi välittömästi pois alkoholilla kostutetulla vanutupolla tai harsotaitoksella ja huuhtelee runsaalla vedellä.
- 5. Ole varovainen, ettei potilas vahingossa niele tuotetta.
- 6. Käytä käsineitä tai huolehdi muista sopivista varotoimenpiteistä metakrylaattimonomeerien tai muiden ainesosien mahdollisesti aiheuttamien yliherkkyyssreaktioiden estämiseksi.

2. Käsittelyyn ja muokkaukseen liittyvät varotoimenpiteet

- 1. Tuotetta saa käyttää vain käyttötarkoituksiin, jotka on mainittu kohdassa [II.KÄYTTÖTARKOITUKSET].
- 2. Tuotetta saavat käyttää vain laillistetut hammaslääketieteen ammattilaiset.
- 3. Puhdista kaviteetti huolellisesti, jotta sidos olisi vahva. Jos tartuntapinnalla on sylkeä tai verta, pese pinta huolellisesti ja kuivaa se ennen sidostamista.
- 4. Tuote sisältää etanolia. Kuivaa koko tartuntapinta riittävän hyvin puhaltamalla ilmaa kevyesti vähintään 5 sekunnin ajan, kunnes seos ei liiku. Säädä ilmanpaine kaviteetin ja prosteettisen laitteen muodon ja koon mukaan. Käytä tehoimuria jotta sidosneste ei leviä.
- 5. Käytä aktivaattorin ja sidosaineen sekoittamisen jälkeen v, jotta aineeseen ei pääse lampun- tai luonnonvaloa, ja käytä aine 90 sekunnin kuluessa annostelusta.
- 6. Älä käytä CLEARFIL DC Activator -aktivaattoria muiden sidosaineiden kuin CLEARFIL BONDING SYSTEMin kanssa.

3. Säilytystä koskevat varotoimenpiteet

- 1. Älä käytä tuotetta viimeisen käyttöpäiväyksen jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä on merkitty pakkaukseen.
- 2. Tuote on säilytettävä jääkaapissa (2-8°C/ 36-46°F), kun sitä ei käytetä, ja sen on annettava lämmitä huoneenlämpötilaan 15 minuuttia ennen käyttöä. Tuotteen on jääkaapista ottamisen jälkeen annettava lämmitä huoneenlämpötilaan.
- 3. Pakkaus on suljettava huolellisesti heti käytön jälkeen.
- 4. Tuotetta ei saa altistaa äärimmäiselle kuumuudelle, suoralle auringonvalolle tai liekeille.
- 5. Tuote on säilytettävä asianmukaisessa paikassa, johon vain hammaslääkintähenkilökunnalla on pääsy.

V. SISÄLTÖ JA AINEOSAT

- 1) Sisältö
Tuotteen sisältöä ja määrää koskevat tiedot pakkauksen ulkopuolella.
- 2) Aineosat
Pääasialliset aineosat
Etanoli, Katalysaattorit, Kiihdyttimet

VI. KLIINiset TOIMENPITEET

CLEARFIL DC Activator -aktivaattoria voidaan käyttää yhdessä CLEARFIL SE BOND 2:n kanssa. Jos sitä käytetään muun CLEARFIL BONDING SYSTEMin kanssa, katso ohjeet kyseisen sidosaineen ohjeista. Älä sekoita minkään muun sidosaineen kanssa, jota ei ole suositeltu CLEARFIL DC Activator -aktivaattorin käyttöohjeissa.

A. Pilarin rakentamisen vakiomenettely

A-1. Eristäminen, kosteuden hallinta, juurikanavan valmistelu, pinnan käsittely ja hampaan happoetsaus

Katso käytettävän pilarin rakennusmateriaalin tai yhdistelmämuovisementin käyttöohjeet.

A-2. Hampaan esikäsittele

Levitä CLEARFIL SE BOND 2:n PRIMER kiinnityspinnalle valmistajan ohjeiden mukaisesti.

A-3. Sidos hampaaseen

- 1. Laita yksi pisara tuotetta ja CLEARFIL SE BOND 2:n BONDia sekoitusastian syvennykseen ja sekoita juuri ennen käyttöä.

[VAROITUS]

Käytä valosuojaletkyä, jotta aineeseen ei pääse lampun- tai luonnonvaloa, ja käytä aine 90 sekunnin kuluessa annostelusta.

- 2. Levitä seos annosteluhaarjalla koko kaviteetin seinämään. Varo, ettei sylki tai kosteus pääse kosketuksiin käsitellyjen pintojen kanssa.
- 3. Kuivaa koko tartuntapinta riittävän hyvin puhaltamalla ilmaa kevyesti vähintään 5 sekunnin ajan, kunnes sidos ei liiku. Käytä tehoimuria, jotta sidosneste ei leviä. Poista ylimääräinen seos paperinastalla. Kun olet pyyhkinyt pois ylimääräisen seoksen, kuivaa tartuntapinta tarvittaessa uudelleen.

[HUOMAUTUS]

Säädä ilmanpaine asianmukaista kuivaamista varten tartuntapinnan muodon ja koon mukaan.

- 4. Optimaalisen laadun varmistamiseksi suositellaan valokovettimen käyttöä. Valokovettimen käyttöajat on esitetty käytettävän sidosaineen käyttöohjeissa.

A-4. Nastan ja pilarin paikalleen asettaminen

Aseta nasta ja pilarin rakennusmateriaali paikalleen valmistajan ohjeiden mukaista pilarinrakennusmateriaalia käyttäen.

B. Sementoinnin vakiomenettely

B-1. Kaviteetin valmistelu, prosteettiset restauraatiot

Katso käytettävän resiinisementin käyttöohjeet.

B-2. Hampaan esikäsittele

Katso kohta A-2.

B-3. Sidos hampaaseen

Sekoita BONDin kanssa ja levitä sidospinnalle kohdan A-3 ohjeiden mukaisesti.

B-4. Sementointi

Sementoi prosteettinen restauraatio paikalleen. Pilarin rakentamisen vakiomenettely ohjeita.

[TAKUU]

Kuraray Noritake Dental Inc. vaihtaa kaikki virheelliseksi todetut tuotteet. Kuraray Noritake Dental Inc. ei ota vastuuta vahingoista tai vaurioista, jotka ovat joko suoraan tai epäsuorasti syntyneet yrityksen tuotteiden käytön tai virheellisen käytön johdosta. Ennen tuotteen käyttöönottoa on käyttäjän varmistuttava, soveltuuko tuote siihen käyttötarkoitukseen, johon sitä aiotaan käyttää ja käyttää kantaa kaiken tuotteen käyttöön liittyvän riskin ja vastuun.

[HUOMAUTUS]

"CLEARFIL" ja "SE BOND" ovat KURARAY CO., LTD:n tavaramerkkejä.

 **Kuraray Noritake Dental Inc.**
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

 **Kuraray Europe GmbH**
Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640