

KAIKKIIN KORJAAVIIN TOIMENPITEISIIN

KATANA™ Cleaner

Suun sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön



KATANA™ Cleaner

Poistaa kontaminaatiot optimoiden sidostustoimenpiteet.

Restauration sovituksen aikana pinnat saattavat kontaminoitua proteiineista heikentäen sidosta.

KATANA™ Cleanerin erinomainen puhdistusteho perustuu MDP-suolan pinta-aktiivisiin ominaisuuksiin.

Muihin puhdistusaineisiin verrattuna KATANA™ Cleanerin pH-arvo on 4,5¹, joka mahdollistaa käytön ei vain suun ulko- vaan myös suun sisäpuolella. Se on helppo tapa optimoida sidostus mukaan lukien sementointi.

1. Mittausmenetelmä: JIS Z 8802:2011


LAAJA INDIKAATIOALUE: SUUN SISÄISESTI JA ULKOISESTI

Miedon pH arvon – 4,5 – ansiosta KATANA™ Cleaner soveltuu paitsi suun ulkoiseen mutta myös suun sisäiseen käyttöön tehden siitä kaiken kattavan yleispuhdistusaineen sekä hammaskudokselle että proteettisille ratkaisuille.



Suun sisäisesti:

Kaviteetit, nastat, juurikanavat

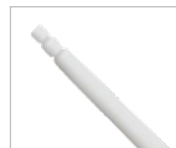

Protetiikka:

Keramia (zirkonio, litiumdisilikaatti, hammasposliini)


Muovipohjaiset materiaalit (CAD-/CAM-kruunut, yhdistelmämuovi)

Metallit (jalo- /epäjalot metalliseokset)


Nastat (lasikuitunastat, metallinastat)

HELPPO JA NOPEA MENETELMÄ

Applikoi, huuhtelee ja kuivaa. Se on kaikki, mitä tarvitset sidostusmenetelmäsi optimoimiseksi. Toisin kuin muut puhdistimet, jotka vaativat pidempää hankaamisaikaa ja ovat rajoitettuja vain suun ulkopuoliseen käyttöön, **KATANA™ Cleaner** vaatii vain **10 sekuntia** ja sitä voidaan käyttää suun sisä- ja ulkopuolella.

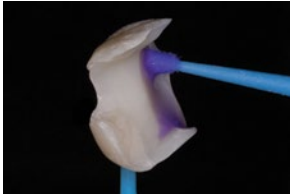

Applikoi ja hankaa KATANA™ Cleaneriä vähintään 10 sekunnin ajan. Sekä restauraatiolle että suun sisäiselle sidospinnalle.

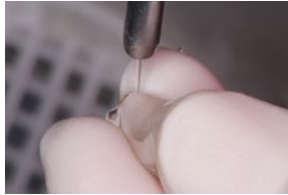

Huuhtelee ja kuivaa.



Sementoi restauraatio valmistajan ohjeiden mukaisesti.



Kuvat ovat Dr. Shoji Katon luovuttamia

PUHDISTUSAINEIDEN VERTAILU*

	KATANA™ CLEANER	IVOCLEAN** (IVOCLEAR VIVADENT)	ZIRCLEAN** (BISCO)
Suun sisäinen käyttö hammasrakenteella	Kyllä	Ei	Ei
Suun sisäinen käyttö implantituilla	Kyllä	Ei	Ei
Suun ulkopuolinen käyttö	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Aktiivinen ainesosa	MDP-suola (pinta-aktiivinen aine)	Natriumhydroksidi	Kaliumhydroksidi
pH	4,5	13-13,5	13
Applikointiajat	10 sekuntia	20 sekuntia	20 sekuntia
Käsittely	Ei ravistelua	Ravista ennen käyttöä	Ei ravistelua

* Käyttöohjeiden ja virallisen dokumentoinnin mukaan.

** Ei ole Kuraray Noritake Dental Inc.:n tavaramerkki.

TUOTEVALIKOIMA

TUOTENRO	TUOTEKUVAUS	SUOSITUSHINTA*
#3970-EU	KATANA™ Cleaner 4,0ml	€ 25,70
#3971-EU	KATANA™ Cleaner Trial 1,0ml	ei saatavilla

* Hinnat ilman ALV:a

Plandent

Plandent Oy, Asentajankatu 6, 00880 Helsinki. Puh. 020 368 680, www.plandent.fi

Lisätietoja osoitteesta kuraraynoritake.eu/fi/katana-cleaner

BORN IN JAPAN

Kuraray Europe Benelux, Nordics & Baltics, Margadantstraat 20, 1976 DN IJmuiden, Alankomaat, +09 424 532 74, informordics@kuraray.com, www.kuraraynoritake.eu/fi