



Cool Temp[®]
N A T U R A L

Automaattisesti sekoittuva, väliaikainen kruunu- ja siltamateriaali

- Kovettuu nopeasti
- Nopeampi kiillottaa
- Erittäin kestävä & luonnollisen esteettinen, parannettu fluoresenssi



Nyt kätevissä 5 ml:n ruiskuissa.

coltène 
whaledent[®]

MIELLYTTÄVÄ ASIAKKAALLE

Cool Temp® NATURAL -materiaalin alhainen kovetuslämpötila ei vahingoita tai ärsytä pulpaa. Materiaali on miellyttävää verrattuna jauhe- ja nesteakryyleihin, jotka kuumenevat melkoisesti ja ovat pahanhajuisia ja -tuoksuisia. Helppo valmistus nopeuttaa myös työskentelyä.


MIELLYTTÄVÄ HAMMASLÄÄKÄRILLE

Cool Temp® NATURALin avulla väliaikaistoiden valmistaminen ja sovittaminen on helppoa ja nopeaa. Optimaalisen elastisen vaiheen ansiosta materiaali on helppo poistaa suusta lyhyen ajan kuluttua. Inhibiokerros voidaan helposti ja nopeasti pyyhkiä pois. Tuloksena on tarkka väliaikaistyö, jota on helppo trimmata ja kiillottaa.

AUTOMAATTINEN SEKOITUS


Cool Temp® NATURAL on pakattu kätevään ampulliin, joka sopii yhteen uuden 1:1/2:1 -annostelijan kanssa. Automaattisekoitus on yksinkertaista, siistiä ja säästää aikaa. Sekoitettu materiaali on aina homogeenista.

Jopa 75 % vähemmän aikaa suussa

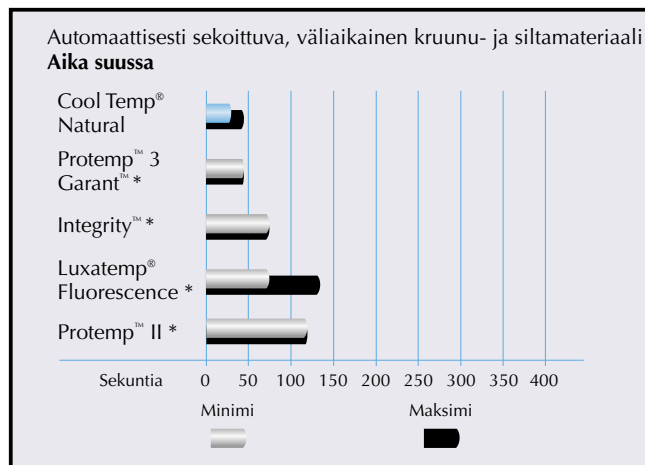

Lähde: Tiedot ovat materiaalin valmistajan käyttöohjeesta.

Nopeampi kuin markkinoiden johtavat vastaavat tuotteet

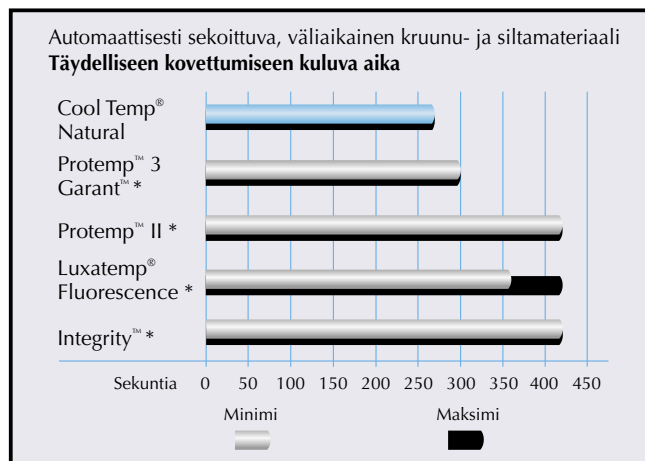

Lähde: Tiedot ovat materiaalin valmistajan käyttöohjeesta.

5 ml:n automaattisesti sekoittava ruisku

- * Helppo käyttää
- * Tarkka ruiskutus suoraan matriisiin
- * ei ylimääräistä materiaalia = taloudellinen
- * Ei annostelijaa
- * Ideaali yksittäisille kruunuille



YLIVOIMAINEN ESTETIIKKA

- * 3 Fluorescent Vita™ -värisävyä

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN

- * Ei kutistu = parempi saumatiivisyys
- * Erinomainen kiillotettavuus

ALHAISEMPI KOVETUSLÄMPÖTILA

- * Alhainen lämpötila ei vahingoita tai ärsytä pulpaa

Ensimmäinen leikattava väliaikainen sementti

Helppo annostelu

- Kätevä 5 ml:n automaattisesti sekoittava ruisku ja oraalikärki

Vaivaton puhdistus

- Ei ylimääräistä materiaalia preparaateissa ja restoraatioissa


Aikaasäästävä

- Ideali työskentely- ja kovettumisaika

Ainutlaatuinen siloksaani ZrO_2 -koostumus

- Erinomainen saumatiiviyys

Helppo annostelu... vaivatonta puhdistaa

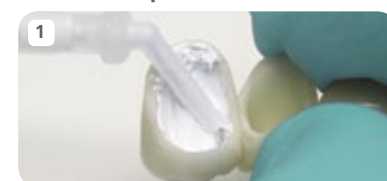

Annostele suoraan restoraatioon erikois-oraalikärjellä



Leikkaa ylimääräinen materiaali pois 2 minuutin kuluttua



Helppo poistaa ilman sementtijäämiä preparaattilla



TempoSIL ei lohkea tai murene leikattaessa

Työskentelyaika:
maks. 50 s



Intraoraalinen
kovettumis-
aika:
min. 2 min



STEP-BY-STEP

1. Ota jäljennös ennen hampaan preparointia. Preparoi sen jälkeen hammas normaalisti.



2. Täytä jäljennös Cool Temp® NATURAL -materiaalilla ja aseta preparoidun hampaan päälle (35 sek).



3. Poista väliaikainen Cool Temp® NATURAL 30 - 45 sekunnin kuluttua suusta. Materiaali on tällöin elastista ja se voidaan helposti ottaa pois suusta.



➔ HYÖDYLLINEN VINKKI:

Jotta suusta poistaminen olisi vieläkin helpompaa, eristä hammas Coltène® Separatorilla ennen Cool Temp® NATURALin asettamista.

4. Poista inhibitiokerros alkoholilla. Trimmaa ja kiillota.



➔ KORJAUSVINKKI:

Käytä SYNERGY® Flow -materiaalia ilmakuplien täyttämiseen, ääriviivojen viimeistelyyn ja kontaktien parantamiseen.



STEP-BY-STEP



Tilaustiedot

Ampullit

- 5800 Cool Temp® Starter Kit**
Cool Temp® -ampullit,
A2, A3.5 2 x 50 ml
MT/BUE/CLEAR/WHITE/77/P* 20 kpl
SYNERGY® Flow A2/B2 1 x 2.3 g
SYNERGY® Flow A3.5/B3 1 x 2.3 g
Flow -applikointineuloja 4 kpl
- 5805 Cool Temp® Single Pack**
Cool Temp® -ampulli **A2** 1 x 50 ml
MT/BUE/CLEAR/WHITE/77/P* 10 kpl
- 5810 Cool Temp® Single Pack**
Cool Temp® -ampulli **A3.5** 1 x 50 ml
MT/BUE/CLEAR/WHITE/77/P* 10 kpl
- 5815 Cool Temp® Single Pack**
Cool Temp® -ampulli **A1** 1 x 50 ml
MT/BUE/CLEAR/WHITE/77/P* 10 kpl

Ruiskut

- 5820 Cool Temp® -ruisku, Refill**
Cool Temp® -ruisku **A1** 2 x 5 ml
MT/BROWN/CLEAR/RED/50/P* 8 kpl
- 5824 Cool Temp® -ruisku, Refill**
Cool Temp® -ruisku **A2** 2 x 5 ml
MT/BROWN/CLEAR/RED/50/P* 8 kpl
- 5825 Cool Temp® -ruisku, Refill**
Cool Temp® -ruisku **A3.5** 2 x 5 ml
MT/BROWN/CLEAR/RED/50/P* 8 kpl
- 5821 Cool Temp® -ruiskupaketti**
Cool Temp® -ruisku **A1** 6 x 5 ml
- 5822 Cool Temp® -ruiskupaketti**
Cool Temp® -ruisku **A2** 6 x 5 ml
- 5823 Cool Temp® -ruiskupaketti**
Cool Temp® -ruisku **A3.5** 6 x 5 ml

Lisävarusteet

- SYNERGY® Flow Refills**
8450 A2/B2, 3 neulaa 1 x 2.3 g
8451 A3.5/B3, 3 neulaa 1 x 2.3 g
8469 Flow -applikointineuloja, taivutettuja 20 kpl
- 6900 Coltène-annostelija 50 / 75 ml** 1 kpl
- 7774 MT/BUE/CLEAR/WHITE/77/P*** 40 kpl
- 6748 MT/BROWN/CLEAR/RED/50/P*** 40 kpl
- 7235 Separaattori**
(intraoraaliseen käyttöön) 1 x 5 ml
- 6720 TempoSIL Intro Kit**
TempoSIL ruiskuja 2 x 5 ml
MT/BROWN/CLEAR/WHITE/56/
WITH OT* 20 kpl
- 6725 TempoSIL Refill**
TempoSIL ruiskua 4 x 5 ml
- 6749 MT/BROWN/CLEAR/WHITE/56/
WITH OT*** 40 kpl

* MT = Sekoituskärki, OT = sisältää oraalikärjet

www.coltenewhaledent.com
©2006 Coltène/Whaledent AG

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Suomessa
PL 7, 20321 Turku/Finland
puh/fax +358 (0)2 2502 440
+358 (0)400 52 79 07
jaana.jaakola@coltenewhaledent.inet.fi

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

coltène
whaledent