


KÄYTTÖOHJEET

1. Suosittelemme filmin desinfiointia ennen käyttöä. Röntgensäteilylle altistamisen jälkeen, pitäen ERGONOM-X pystyasennossa, avataan neste-pussi kiertäen sitä rullalle. On tärkeää rullata pussi sen reunaan asti, varmistaen, että kaikki neste kulkee filmin toiseen laitaan.



2. Pitäen kiinni filmin yläreunasta, aloitetaan toisella kädellä filmin hierominen liu'uttaen sormia ylhäältä alas painaen kohti filmiä, toistaen tätä liikettä vähintään 50 sekunnin ajan. ON TÄRKEÄÄ LIIKUTELLA FILMIÄ : LAKKAAMATTA, 50 SEKUNNIN AJAN, JA VÄLITÖMÄSTI PUSSIN AVAUTUMISEN JÄLKEEN, jotta kuvasta ei tule laikukas.

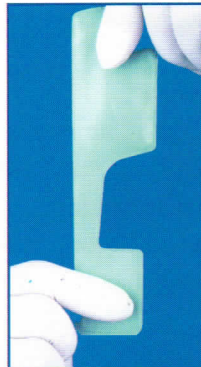

3. Kun kehitys ja kiinnitys on suoritettu, käännetään filmi ylösalaisin ja kuljetetaan neste filmiä sormin hieroen takaisin sen alkuperäiseen paikkaan. Filmi avataan siihen tarkoitettuja kielekkeitä apuna käyttäen, se vedetään ulos ja huuhdellaan juoksevan veden alla, liu'uttaen samalla sormia filmin pinnalla, jotta kaikki neste huuhtoutuisi pois. Filmi-pakkaus voidaan hävittää muiden ongelmajätteiden kanssa, jotta kuvasta ei tule kellertävä.



DENTALFILM ERGONOM-X

ITSEKEHITTYVÄ HAMMASRÖNTGENFILMI

DENTALFILM s.r.l.

VIA VERGA, 30

10036 SETTIMO TORINESE (TO) - ITALY

Tel. 011/800.00.90 - Fax 011/800.00.62

www.dental-film.com



EI!

**I purista
keskikohdasta!
Noudata ohjetta
kuten kohdassa 2.**



CE
0476



VALOTUSTAUUKKO

VALOTUSTAUUKKO	KOHDE	AIKA (70kV 8 mA)
Yläleuka	Molaarit	0,5 Sec.
	Premolaarit	0,35 "
	Kulmahampaat	0,3 "
	Inkisiivit	0,3 "
Alaleuka	Molaarit	0,35 Sec.
	Premolaarit	0,3 "
	Kulmahampaat	0,25 "
	Inkisiivit	0,25 "

D-luokan filmin aika ja asento säädetään röntgenlaitteen mukaan.