

Kaiko-EzTest

STERILOINNIN VALVONTAAN

Biologinen indikaattori höyrysteriloinnin varmennukseen.

EN 866 ja ISO 11138 mukainen, sisältää *geobacillus stearothermophilus* itiöitä.

Toiminta

Käytä biologista Ez Test indikaattoria höyrysteriloinnin varmennukseen 3 kuukauden välein.

Bowie&Dick testi tulee tehdä joka aamu kun laitetta käytetään.

Testi tehdään myös mikäli kemiallisten indikaattoreiden muutos ei ole normaali tai Bowie&Dick testissä on ilmennyt häiriöitä sekä aina huollon ja validoinnin yhteydessä.



EzTest indikaattori

Helppokäyttöinen

Höyrysteriloinnin varmennukseen

Ilmainen viljelypalvelu

Selkeä tulkinta

Sopii myös DAC-laitteille

Käyttö

1. Numeroi indikaattorit juoksevasti (Huom! Merkitse numero ampullin etikettiin, älä ruskeaan korkkiin) ja merkitse testauslomakkeeseen, mihin kohtaan autoklaavia sijoitat kunkin ampullin.

Merkitse lomakkeeseen myös autoklaavin numero, ajon (erän) numero sekä sterilointipäivä. Kirjaa lomakkeeseen myös käytettävien ampullien eränumero (lot) ja viimeinen käyttöpäivä (exp.).

Ota viljelyä varten sivuun yksi ampulli samasta erästä, ja merkitse se "C" kirjaimella kontrolloiampulliksi. Huomioi, että samaan aioon asetettavien ampullien tulee kaikkien olla samasta erästä.

2. Aseta kapselit steriloitavien tuotteiden joukkoon ja pakkauksiin steriloinnin kannalta kriittisimpiin kohtiin; 1. ylimmälle hyllylle välittömästi oven läheisyyteen 2. keskihyllylle takaseinän läheisyyteen ja 3. alimmalle hyllylle lähelle pohjasuodatinta.

Älä aseta indikaattoreita seiniin kiinni. Pöytä-autoklaaveissa, joissa ei ole esityhjiötä, tulee kapseli olla vaakasuorassa, jotta ilma pääsee poistumaan ampullista.

3. Suorita sterilointi. Etiketissä oleva sininen raita muuttuu steriloidessa ruskeaksi / mustaksi.
4. Anna kapselien jäähtyä vähintään 10 min.
5. Tee testaus kaikissa käytössä olevissa ohjelmissa (121 °C, 134 °C).
6. Suorita viljely tai lähetä indikaattorit maksuttomaan viljelypalveluumme. Muista lähettää myös sterilioimaton kontrolloiampulli. Älä avaa tai riko kapselia.

Viljelyohjeet

EZ-Test höyrysteriloinnin indikaattorit viljellään kuiva- tai vesihauteessa, 57 °C lämpötilassa. Viljelyaika on 24 h, suuntaa antava tulos luettavissa jo 10 h kuluttua.

SEZ-Test viljellään 58–62 °C lämpötilassa viljelyaika 10 h, suuntaa antava tulos saadaan jo 3 h kuluttua.

Mikäli yksikössä ei ole käytettävissä omaa inkubaattoria, voidaan ampullit toimittaa inkuboitavaksi viljelypalveluumme.



Biologia indikaattoreita saatavana myös muihin sterilointimenetelmiin.

Kapselin rikkominen

1. Riko kapselin sisällä oleva lasiampulli puristamalla sitä muovisella EZ-Test puristimella.

Huom! Pidä kapseli pystyasennossa. Muutamissa inkubaattoreissa ampulli rikkoutuu kun se asetetaan laitteessa olevaan telineeseen, tällöin EZ-Test puristinta ei tarvita.

2. Aseta steriloidut EZ-Test indikaattorit sekä kontrolliampulli inkubaattoriin. Luotettava tulos on nähtävissä 24 h kuluttua. SEZ indikaattorissa 0 tunnin kuluttua.

Keltainen väri = Epästeriili, itiöt kasvavat
Violetti väri = OK, steriili, itiöt ovat kuolleet

3. Ryhdy välittömästi toimenpiteisiin, jos ampullien väri muuttuu keltaiseksi. Etsi syy ja korjaa se.

Tuotteita **ei saa** päästää eteenpäin ennen vian korjaamista ja sen jälkeistä hyväksyttävää EZ-Testiä.

4. Kirjaa tulokset.
5. Epästeriilit EZ-Test ampullit hävitetään steriloituina 121 C 15 min.



EZ-Test puristin

Pakkaus	Varastointi
Tuotekoodi EZS-20: 20 kpl/pkt, EZS-100: 100 kpl/pkt (24 tunnin elatus) Tuotekoodi SEZ-20: 20 kpl/pkt, SEZ-100: 100 kpl/pkt (10 tunnin elatus)	Säilytetään huoneenlämmössä Suojattava kemikaaleilta Säilyvyys 2 vuotta valmistuspäivästä

Myynti

Plandent Oy, Asentajankatu 6, 00880 Helsinki

Puhelin: 020 368 680, faksi: 020 779 5344

E-mail: myynti@plandent.com, www.plandent.fi



Kaiko Oy | Puhelin (09) 684 1010 | Henry Fordin katu 5 C, 00150 Helsinki | www.kaiko.fi

