

ProCare Protein Check proteiinitesti: nopeaan puhdistustuloksen tarkastukseen



Tarkka levitys testikynällä

Instrumenttien pinnan nopeaan testaukseen

Puhdistettaviin instrumentteihin tarttuneet proteiinit denaturoituvat ja kiinnittyvät instrumentteihin pesu- ja desinfiointiprosessin ja lämpödesinfiointin aikana. Instrumenttien puhdistustuloksen objektiivinen tarkastus tavanomaisen näytteenoton ja analyttisten menetelmien avulla ei tämän jälkeen enää ole käytännössä mahdollista.

Miele Professionalin ProCare Protein Check proteiinitesti on pikatesti, joka mahdollistaa helpon ja nopean proteiinijäämien määrittämisen instrumenttien näkyviltä pinnoilta myös lämpödesinfiointin jälkeen.

ProCare-proteiinitesti paljastaa proteiinijäämät. Tämä uusi pikatesti täydentää erinomaisesti havainnoimalla tehtyjä rutiinitar-
kastuksia. Sen avulla voidaan myös nopeasti selvittää, onko instrumentin pinnan erinäköi-
nen kohta ruostetta, silikaattisaostuma vai onko kyse vain proteiinijäämästä.

Testattava pinta kostutetaan ensin punaisella väriaineliuoksella. Testikynän kapealla kärjellä liuos voidaan levittää valumattomasti ja tarkasti. Annetaan vaikuttaa kolme minuuttia ja huuhdellaan sen jälkeen kahden sekunnin ajan juoksevilla vedellä. Jäljelle jäävä punai-
nen väri kertoo proteiinijäämästä.

ProCare-proteiinitesti on erityisen nopea ja helpokäyttöinen. Siksi tämä pikatesti sopii erinomaisesti niin keskusvälinehuollon tai osastokohtaisen välinehuollon kuin hammas-
lääkäreiden ja lääkärikeskustenkin käyttöön.

- Proteiinijäämien määrittämiseen lämpödesinfiointin jälkeen.
- Näyttää instrumenttien mahdolliset proteiinijäämät välittömästi.
- Tarkka levitys testikynän avulla.
- Testin tulos nähtävissä 3 minuutissa.

Lisätiedot:

Miele Oy, Porttikaari 6, 01200 Vantaa
(09) 875 97500
www.miele.fi/professional
professional@miele.fi