


STERI-PAK LF

Valmis Bowie-Dick testipakkaus esityhjiöllisille höyryautoklaaveille

Täyttää EN 867-3 standardin.

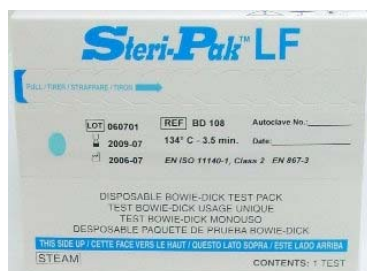

TOIMINTA

- Steri-Pac LF on lyijytön Bowie-Dick testipaketti autoklaavin ilmanpoistotohon ja sterilointahöyryn tunkeutumistohon testaamiseen.
- Pakkaus on kertakäyttöinen ja valmis käytettäväksi sellaisenaan – ei vaadi esivalmisteluja.
- Testi on tarkoitettu suurille autoklaaveille. Testi on suoritettava joka aamu ennen laitteen varsinaista käyttöä.

KÄYTTÖ

- Autoklaavin toimintalämpötila (134 °C) tulee olla saavutettu ennen Bowie-Dick testin suorittamista. Aja lämmitysajo.
- Aseta indikaattoripakkaus **tyhjän kammion** kylmimpään pisteeseen (alin hylly tai kori heti oven edessä) pakkauksen **kuviopuoli alaspäin**.
- Käynnistä **Bowie-Dick ohjelma** (3.5 min, 134 °C). Kuivausvaihe ei ole välttämätön. Mikäli kuivausvaihe ajetaan, tulee sen kestää alle 5 min.
- Poista testipakkaus autoklaavista. Avaa pahvipakkaus repäisykohdasta. Varo! Testipakkaus on kuuma välittömästi ajon jälkeen. Ota indikaattoriarkki esiin pakkauksesta.



PAKKAUS

- BD-108: 20 kpl käyttövalmiita testejä

VARASTOINTI

- Varastoidaan normaalissa huoneenlämmössä (0 – 40 °C), ilmankosteus 10-70 %
- Suojattava ylimääräiseltä kosteudelta ja valolta
- Oikein säilytettynä testien käyttöaika on 3 vuotta valmistuspäivästä




TULKINTA




Hyväksytty tulos = musta

Virhe = sininen

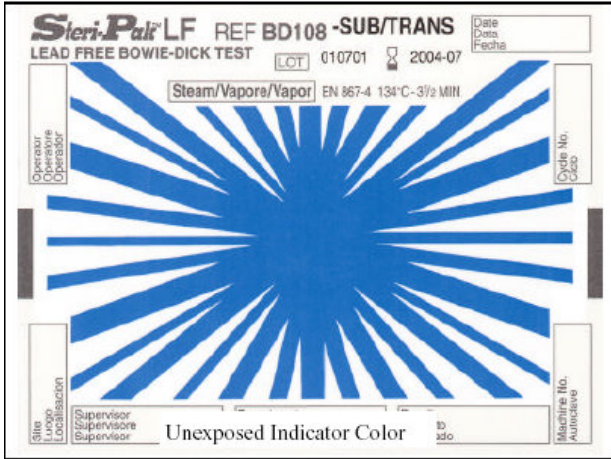

Käyttämättömässä testissä kuvio on kauttaaltaan sininen.

Hyväksytysti läpi menneessä testissä kuvio on kauttaaltaan musta.

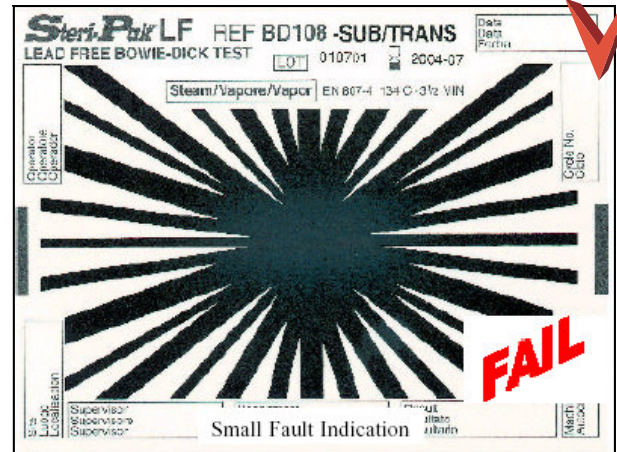

SUURI VIRHE: Testi osoittaa virhettä, kun kuvion väri ei ole muuttunut kauttaaltaan mustaksi, vaan keskelle on jäänyt sininen läiskä.

PIENI VIRHE: Testi osoittaa virhettä, kun kuvion väri ei ole muuttunut kauttaaltaan mustaksi, vaan keskelle on jäänyt pienikin sininen läiskä.

Ilma ei ole poistunut pakkauksesta kokonaan.

Ilma ei ole poistunut pakkauksesta kokonaan.

Steri-Pak LF	
LEAD FREE BOWIE-DICK TEST	
STEAM / VAPOR / VAPEURI / VAPOR 134°C - 3.5 MIN, CLASS B	
INDICATOR TURNS FROM BLUE TO BLACK L'INDICATEUR VIREA DAL BLEU AL NERO L'INDICATEUR VIREA DAL BLEU AU NOIR EL INDICADOR CAMBIA DE AZUL A NEGRO	
SITE / LUOGO / SITIO	DEPARTMENT / REPARTO / SERVICE / DEPARTAMENTO
AUTOKLAVE N.	OPERATOR / OPERATORE / OPERATEUR / OPERARIO
CYCLE NO. / CICLO NO.	
SUPERVISOR / SUPERVISORE / SUPERVISEUR	RESULT / RESULTATO / RESULTAT / RESULTADO
DATE / DATA / FECHA	PASS / INSCITTO / CORRECTO FAIL / FALLITO / NON CONFORME / INCORRECTO

TULOSTEN KIRJAUS

Kirjaa testitulos arkin kääntöpuolelle.