


TOSI-TESTI

Pesutehon testi standardin EN ISO 15883 mukaisille pesu- ja desinfektio-koneille. Testimenetelmä perustuu ajatukseen, että pesu- ja desinfektio-koneen on pystyttävä pesemään veri pois instrumenteista.

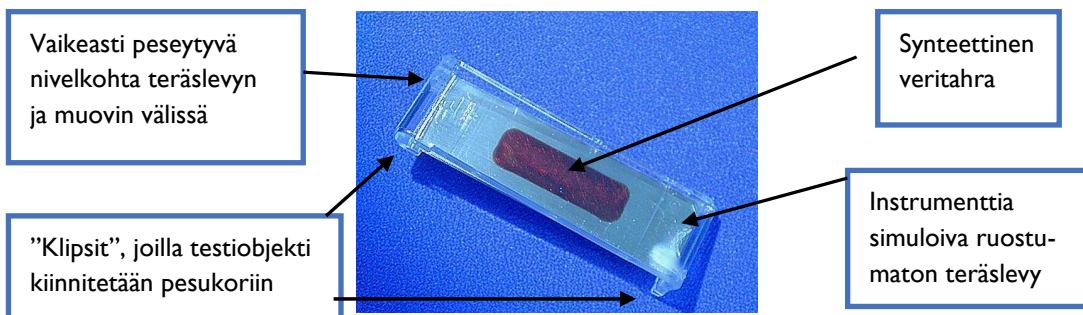


TOIMINTA

- Toiminnallisella TOSI-testillä tarkastat pesu- ja desinfektio-laitteesi toiminnan ja saat asetettua pesuparametrit kohdalleen. Toiminnallisen testin jälkeen laitteen pesutehon seuranta jatketaan rutiinitesteillä kahden viikon välein. Rutiinitesti tehdään kuorman kanssa.
- Kertakäyttöinen testiobjekti koostuu vaikeasti peseytyvästä nivelkohdasta, instrumenttia simuloivasta ruostumattomasta teräslevystä sekä synteettisestä veritahra.

TESTIMENETELMÄT

Pesukoneen toimintakunnon testi

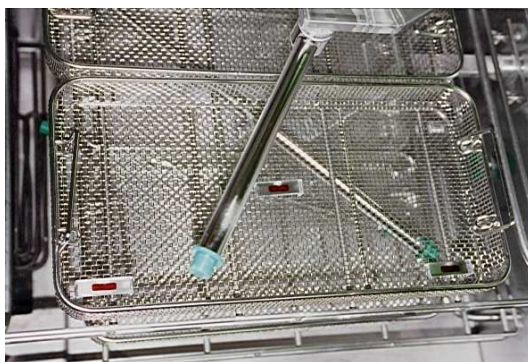

- Toiminnallisella testillä tarkastetaan pesu- ja desinfektio-koneen toimintakunto, sekä asetetaan pesuparametrit (mm. pesuohjelman eri vaiheiden pituudet ja lämpötilat, sekä pesuaineen annostelu) kohdalleen.
- Toimintakunnon testi suoritetaan aina, kun testit otetaan ensimmäisen kerran käyttöön tai kun pesuparametrit muutetaan.
- Toimintakunnon testi suoritetaan normaalilla pesuohjelmalla, tyhjällä koneella.

TOSI-TESTI

TESTIMENETELMÄT


Pesukoneen rutiinitestaus



- Pesu- ja desinfektio laitteen pesutehoa ja suorituskkyä seurataan rutiinitestein kahden viikon välein.
- Rutiinitestissä TOSI-testiobjektit sijoitetaan normaalin pestävän kuorman sekaan kriittisille paikoille.
- Rutiinitestillä varmistetaan, että pesu on tehokasta kaikissa osissa konetta kuorman kanssa. Testin avulla saat selville, mikä on kuorman sopiva koko, jotta pesutulos olisi edelleen hyvä.

KÄYTTÖOHJE

- Avaa TOSI-testin suojapakkaus vasta juuri ennen käyttöä.
- Aseta 3 testiobjektia jokaiselle pesutasolle. Paina testiobjekti sen pohjassa olevien ”klipsien” avulla pesukorin pohjaan kiinni. Testit sijoitetaan esimerkiksi kuvan osoittamalla tavalla kriittisille paikoille: lähelle kulmia sekä korin keskelle (ei kuitenkaan sellaiseen kohtaan, jossa ei instrumenttejakaan pestä). Mikäli pesukoneessa on erikoistelineitä, TOSI-testi voidaan sijoittaa telineeseen erikseen myytävän TOSI Mini Tray –pesuverkon avulla.
- Aja ohjelma normaalisti läpi ja arvioi tulos koko pesuprosessin päätyttyä.
- Voit kuivata testiobjektin paineilmapistoolin avulla ja halutessasi irrottaa teräsläpyn päällä olevan muovipleksin.

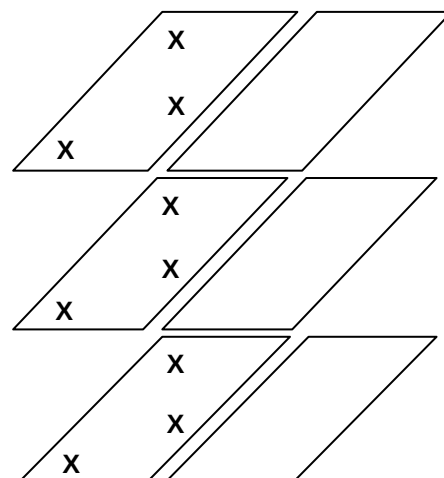

PAKKAUS

- PEREG03 TOSI-testipakkaus sisältää 12 kpl käyttövalmiita testejä
- Toimitamme testien mukana värillisen tulkintakaavion
- Tuotekoodi: 17035

Testin nimi	Testin kuva	Testin kuva	Testin kuva	Testin kuva
1. TOSI-Testiobjekti	2. TOSI-Testiobjekti	3. TOSI-Testiobjekti	4. TOSI-Testiobjekti	5. TOSI-Testiobjekti
6. TOSI-Testiobjekti	7. TOSI-Testiobjekti	8. TOSI-Testiobjekti	9. TOSI-Testiobjekti	10. TOSI-Testiobjekti
11. TOSI-Testiobjekti	12. TOSI-Testiobjekti	13. TOSI-Testiobjekti	14. TOSI-Testiobjekti	15. TOSI-Testiobjekti
16. TOSI-Testiobjekti	17. TOSI-Testiobjekti	18. TOSI-Testiobjekti	19. TOSI-Testiobjekti	20. TOSI-Testiobjekti

VARASTOINTI

- Säilytä TOSI-testit pakkauksessaan käyttöön asti, +2 — + 25 °C, suojaa testejä valolta, kuumuudelta ja kemikaaleilta
- Säilyvyys: 1,5 vuotta valmistuspäivästä

MYynti

Plandent Oy

Asentajankatu 6 • 00880 Helsinki

Puhelin: 020 368 680 • Faksi: 020 779 5344

E-mail: myynti@plandent.com • www.plandent.fi



MAAHANTUONTI:

KAIKO OY

Kaiteer

Henry Fordin katu 5 C • 00150 Helsinki • Vaihde: (09) 684 1010 • Faksi: (09) 6841 0120

Sähköposti: kaiko@kaiko.fi • Internet: www.kaiko.fi

730-7
09/09