




Alu Deko

Konepesuaine

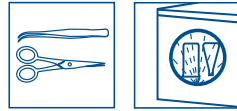

Nestemäinen, vaahtoamaton konepesuaine huuhtelu- ja pesudesinfektiolaitteisiin terveydenhuollon ja suun terveydenhoidon eri toimipisteissä.

Käyttökohteet	Välinehuollon ja toimenpideyksiköiden pesu-desinfektio koneet, myös keskitettyihin välinehuoltoihin. Osastojen huuhtelu-pesukoneet, suun terveydenhuollon pesu-desinfektio koneet. Ammattikäyttöön.		
Tuoteominaisuudet	Alu Deko on tuotekehitetty yleisesti terveydenhuollossa käytettävien konepestävien instrumenttien, välineiden ja materiaalien pesuun. Alu Deko konepesuaineessa on käytetty mahdollisimman työturvallisia ja ympäristömyönteisiä, tutkittuja raaka-aineita. Puhdistusteho on optimoitu ja testattu terveydenhuollon erityisvaatimusten mukaiseksi (Helsingin yliopiston Hjelt-Instituutin Kansanterveystieteen osaston Hygienian ja mikrobiologian laboratorio). Tuote soveltuu myös herkille materiaaleille. Vaahtoamaton.		
Käyttö- ja annostusohje	Liitä kanisteri pesukoneen automaattiannostelijaan. Ohjeellinen annostus huuhtelu- ja pesu-desinfektio koneissa on n. 0,3 % käyttöliuos, 30 - 70 ml /pesu. Annostukseen vaikuttavat pestävä materiaali ja veden laatu. Paras puhdistustulos saadaan 45-55°C pesulämpötilassa. Kone lämpödesinfioi puhdistetut ja huuhdotut instrumentit sekä kammion valitun pesuohjelman mukaisesti.		
Huomioitavaa	Huomioi laitteen täytössä, että vesisuihkut pääsevät pestävien välineiden kaikille pinnoille. Aseta pestävä välineistö väljästi koneeseen. Käytä tarvittaessa erikoistelineitä. Laitteen moitteeton toiminta on tarkistettava määräajoin turvallisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Noudata instrumenttivalmistajien erikoisohjeistuksia.		
Koostumus	Tehoaine	Vaikutus	
	Kompleksointiainetta	5-15 %	sitovat veden kovuustekijöitä
	Polykarboksylaattia	< 5 %	pesuteho, irrottaa likaa, sitoo sen veteen
	Natriummetasilikaattia	< 5 %	pH:n säätelijä, irrottaa likaa, korroosiosuoja
	Fosfonaatteja	< 5 %	pehmentää vettä, dispergoi likaa, nopeuttaa huuhtoutuvuutta
Tuotteen pH	13.0 vahvasti emäksinen		
Käyttöliuoksen pH	11.0 emäksinen		
Varastointi	Huoneenlämmössä 3 v.		
Ulkonäkö ja tuoksu	Kirkas, kellertävä neste		
Valmistusmaa	SUOMI		
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus	Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta. Helposti biologisesti hajoava.		

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi****Myyntierä****Tuotekoodi****GTIN****Myyntierän GTIN**

3 x 5 l	80387	6417964803877	6417964482577
1 x 20 l	8084	6412600080841	
1 x 200 l	8280	6438160082804	

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.com tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.