

BioSonic® -puhdistusnesteet

Puhdistusneste joka tilanteeseen

MeterDose™ -pullot –tarkkaan annosteluun

Annostele tarkasti tarvitsemasi määrä puhdistusnestettä. Purista pullosta sopiva määrä MeterDose™-annostelumittaan ja kaada.



- ei hukkaan mennyttä ainetta
- ei roiskeita
- ei sotkua
- helppo käyttää
- taloudellinen



Neste	Sisältö	Sekoitussuhde ultraäänipesussa
UC30 Yleispuhdistusneste Tiiviste	473 ml	Tiivistettä: 16ml / 1l Laimennetuna yhteensä: 29 litraa
Käyttötarkoitus	Käyttökohteet	Huomioitavaa
UC30 on ei-ioninen yleispuhdistusaine. Se poistaa orgaanisen lian, kuten veren, syljen ja muut roiskeet.	Instrumentit, kruunut, sillat, proteesit ja hammaskivenpoistolaitteen kärjet	Käytetään perusnesteenä pääaltaassa. Voidaan käyttää pesunesteenä pääaltaassa kun puhdistus tapahtuu dekantterilasien kanssa. Huuhtelee pesun jälkeen perusteellisesti vedellä.



Yleispuhdistusneste ja ruosteenestoaine

Neste	Sisältö	Sekoitussuhde ultraäänipesussa
UC31 Yleispuhdistusneste + ruosteenestoaine	Yksittäispakattu, 20 x 15 ml	Tiivistettä: 0,4 % Laimennetuna yhteensä: 76 litraa
Käyttötarkoitus	Käyttökohteet	Huomioitavaa
UC31 yhdistää BioSonicin testatun ja tehokkaan puhdistusprosessin ja ruosteeneston ultraäänipesussa. Käytetään yleispuhdistusaineena.	Instrumentit, kruunut, sillat, porat, proteesit ja hammaskivenpoistolaitteen kärjet	Käytetään perusnesteenä pääaltaassa. Voidaan käyttää pesunesteenä pääaltaassa kun puhdistus tapahtuu dekantterilasien kanssa. Huuhtelee pesun jälkeen perusteellisesti vedellä.



Neste	Sisältö	Sekoitussuhde ultraäänipesussa
UC32 Entsyymipohjainen yleispuhdistusaine	236 ml	Tiivistettä: 8ml / 1l Laimennetuna yhteensä: 29 litraa
Käyttötarkoitus	Käyttökohteet	Huomioitavaa
UC32 yhdistää ei-ionisen UC 30 -puhdistusnesteen ja itsepäisiin likahiukkasiin tehoavat entsyymit. Poistaa ja hajottaa tehokkaasti instrumentteihin kovettuneet proteiinitahrat. Minimoi käsin hankaimisen.	Instrumentit, kruunut, sillat, proteesit ja hammaskivenpoistolaitteen kärjet	Käytetään perusnesteenä pääaltaassa. Voidaan käyttää pesunesteenä pääaltaassa kun puhdistus tapahtuu dekantterilasien kanssa. Huuhtelee pesun jälkeen perusteellisesti vedellä.

BioSonic® -puhdistusnesteet

Puhdistusneste joka tilanteeseen



Neste/jauhe	Sisältö	Sekoitussuhde ultraäänipesussa
UC34 Kipsin poistaja	840 g	Tiivistettä: 1 kauhallinen / 100 ml Laimennetuna yhteensä: 11,4 litraa
Käyttötarkoitus	Käyttökohteet	Huomioitavaa
Tiivistejauhe kipsin helpoon poistoon. Mukana kätevä mittakauha.	Proteesit, valut, sekoituskupit ja ei-alumiiniset artikulaattorit	Älä käytä alumiinin kanssa. Voidaan käyttää myös suoraan altaassa. Huuhtelee pesun jälkeen perusteellisesti vedellä. Vaihda liuos jokaisen käyttökerran jälkeen.



Neste	Sisältö	Sekoitussuhde ultraäänipesussa
UC38 Desinfioiva pesuneste	236 ml	Tiivistettä: 8ml / 1l Laimennetuna yhteensä: 29 litraa
Käyttötarkoitus	Käyttökohteet	Huomioitavaa
Poistaa veritahrat, roiskeet ja syljen sekä tappaa HIV- ja tuberkuloosivirukset pesuprosessin aikana.	Instrumentit, kruunut, sillat ja hammaskivenpoistolaitteen kärjet	Älä puhdisti proteeseja ja muoveja. Käytetään perusnesteinä pääaltaassa. Voidaan käyttää myösesi-liotukseen ja pesunesteinä pääaltaassa kun puhdistus tapahtuu dekantterilasien kanssa. Huuhtelee pesun jälkeen perusteellisesti vedellä.



Neste	Sisältö	Sekoitussuhde ultraäänipesussa
UC39 Sementinpoistajatiiviste	473 ml	Tiivistettä: 40 %, noin 32 käyttökertaa
Käyttötarkoitus	Käyttökohteet	Huomioitavaa
Puhdistusneste, joka pehmentää sementin. Väliaikaisen ja lopullisen sementin poistoon (myös sinkkifosfaatti ja polykarboksylaatti)	Kruunut, laminaatit, proteesit, braketit ja instrumentit	Älä käytä alumiinin kanssa tai suoraan pääaltaassa. Huuhtelee pesun jälkeen perusteellisesti vedellä.