




Erizyme

Konepesuaine

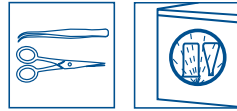

Entsyymitehosteinen konepesuaine terveydenhuollon ja suun terveydenhoidon instrumenttien pesu- ja desinfiointikoneisiin sekä ultraäänipesulaitteisiin.

Käyttökohteet

Välinehuolto, leikkausosastot, hammahuolto. Soveltuu vaativaan ammattikäyttöön ja kaikille konepestäville, myös herkille materiaaleille, mm. alumiini.

Ammattikäyttöön.

Tuoteominaisuudet

Erizyme on vaativaan ammattikäyttöön tuotekehitetty konepesuaine. Sen neutraali pH sopii useimmille materiaaleille. Hyvä pesuteho vähentää välineistön mekaanisen esikäsittelyn tarvetta, tämä voi ajan säästön lisäksi vaikuttaa myös työturvallisuuteen. Hyvä pesutulos saavutetaan pienellä pesuaineannostuksella. Erizyme konepesuaineen pesuteho on tutkittu Helsingin yliopiston Hjelt-Instituutin Kansanterveystieteen osaston Hygienian ja mikrobiologian laboratoriossa tehdyllä puhdistustehon tutkimuksella. Erizyme sisältää mm. proteaasi-entsyymiä, joka irrottaa hyvin valkuaisainelikkaita.

Käyttö- ja annostusohje

Liitä kanisteri pesukoneen automaattiannostelijaan. Ohjeellinen annostus pesu-desinfektiokoneissa on 0,15-0,3 % käyttöliuos. Ultraäänipesulaitteissa 0,5-1 % käyttöliuos. Annostukseen vaikuttavat pestävä materiaali ja veden laatu. Paras puhdistustulos saadaan 45-55°C pesulämpötilassa. Kone lämpödesinfioi puhdistetut ja huuhdotut instrumentit sekä kammion valitun pesuohjelman mukaisesti.

Huomioitavaa

Huomioi laitteen täytössä, että vesisuihkut pääsevät pestävien välineiden kaikille pinnoille. Aseta pestävä välineistö väljästi koneeseen. Käytä tarvittaessa erikoistelineitä. Laitteen moitteeton toiminta on tarkistettava määräajoin turvallisen lopputuloksen saavuttamiseksi. UÄ-pesulaitteessa: huuhto ja kuivaa instrumentit pesun jälkeen.

Noudata laitevalmistajien erikoisohjeistuksia.

Koostumus

Tehoaine

Vaikutus

Ionittomia tensidejä	< 5 %	rasvaa poistavia pesuaktiiviaineita
Amfoteerisiä tensidejä	< 5 %	pesuaktiiviaineita, vaikuttavat vesiliukoisuuteen ja huuhtoutuvuuteen
Kompleksinmuodostajia	5 - 15 %	sitovat kalsiumia ja raskasmetalleja
Monopropyleeniglykolia	15-30 %	pilkkoo rasvaa, alentaa vaahtotasoa toimii säilytysaineena
Vaahdonestoainetta		polymeeriseos, estää vaahdon muodostumisen ja helpottaa huuhtelua
Entsyymejä		proteaasi, pilkkoo valkuaisaineita

Tuotteen pH

7.5 neutraali

Käyttöliuoksen pH

7.5 neutraali

Varastointi

Säilytettävä huoneenlämmössä, alle 30°C asteen lämpötilassa. Varjeltava jäätymiseltä. Biologisesti hajoava. Säilyy 2 vuotta valmistusajankohdasta.

Ulkonäkö ja tuoksu

Kellertävä neste

Valmistusmaa

SUOMI

**Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus**

Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi**

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
3 x 5 l	8137	6417964081374	6417964482928
1 x 200 l	8157	6412600081572	
1 x 1000 l	8158	6417964081589	

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.com tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.