

Bernerin desinfektioaineiden käyttöalueet hammashuollossa

Käyttöalue	Desinfektioaine	Pitoisuus	Desinfektioaika	Käyttö	Huomautuksia, ohjeita, vihjeitä
Kädet	LV Käsihuuhde ¹ Desinfektol G	76,9-80 t-% denaturoitu etanoli glyseroli	Tavanomainen käsien desinfektio 30 s	Hierotaan huolellisesti kuiviin käsiin niin, että kädet pysyvät kosteina vaaditun desinfektioajan.	Pakkauskoost (vaihtelevat valmisteittain): 5 l kanisteri , 1 l dispenso, 500 ml pumppupullo, 100 ml taskupullo
	Dilutus 90 ¹⁻²	93,3 t-% / 90 p-%	Kirurginen käsien desin- fektio 3 min Kirurginen käsien desin- fektio 1 min (Dilutus 90)		
Iho	Desinfektol P	70 p-% denaturoitu etanoli	Kuivumisaika	Käytetään sellaisenaan ihon desinfektioon ennen injektioita, näytteenottoa tai toimenpidettä.	Pakkauskoost: 5 litran kanisteri, 100 ml pullo, 500 ml pullo, 500 ml pumppupullo
Limakalvot Traumaattiset haavat	Desinfektol H	10 p-% denaturoitu etanoli Ksylitoli	Kuivumisaika	Käytetään sellaisenaan. Pyyhi tai huuhtelee kohde valmisteella.	Ei kirvele. Pakkauskoost 500 ml pullo ja 100 ml suihke- pullo
Instrumentit Välineet Porat	Desiol } Desinfektol P }	70 p-% denaturoitu etanoli	Kuivumisaika Kuivumisaika	Käytetään sellaisenaan alkoholia kestävien välineiden desinfektioon.	Desiol sisältää peseviä ainesosia, sopii näkyvästi likaisille pinnoille. Desinfektol P ja A12t Dilutus 80% ovat desinfektioaineita puhtaille välineille. PeraSafe on sporisidinen 10 min vaikutusajassa ts. nestesteriloi ko. ajassa. Peroksygeenien jälkeen huuhtelu vedellä.
	A12t Dilutus 80% ¹⁻² PeraSafe	80 p-% denaturoitu etanoli 1-2 % peroksygeeni	Kuivumisaika 10 min		
Veri- ja eritetahrat	Desiol	70 p-% denaturoitu etanoli	Kuivumisaika	Desiolia käytetään sellaisenaan alkoholia kestävien pintojen ja välineiden veri- ja eritetahroille. VirKon-jauheesta valmistetaan käyttöliuos käsittävälle pinnalle.	Imeytä ensin osa suurista veri- ja eritetahroista ensin kertakäyttöpyyhkeeseen. VirKon-liuos on käyttökelpoinen n. 5 vrk (väri-indikaattori).
	VirKon	1 % peroksygeeni	Käsittelyaika		
Pinnat	Desiol } Desinfektol P }	70 p-% denaturoitu etanoli	Kuivumisaika Kuivumisaika	Nihkeäpyyhintä.	Desiol sisältää peseviä ainesosia, sopii näkyvästi likaisille pinnoille. Desinfektol P ja A12t Dilutus 80% ovat desinfektioai- neita puhtaille pinnoille. VirKon ja PeraSafe itiöinfektio-ongelmiin.
	A12t Dilutus 80% ¹⁻² VirKon PeraSafe	80 p-% denaturoitu etanoli 1 % peroksygeeni 1-2 % peroksygeeni	Kuivumisaika Käsittelyaika Käsittelyaika		
Puhelimet Näppäimistöt Muovipinnat Stetoskoopit	OL-antistaatti	40 p-% denaturoitu etanoli	Kuivumisaika	Suihkuta tai levitä pinnalle ja kuivaa paperilla tai liinalla.	100 ml suihkepullo
	Desinfektol P	70 p-% denaturoitu etanoli	Kuivumisaika		
Vesijärjestelmät	PeraSafe	1-2 % peroksygeeni	Käsittelyaika	Imetään käyttöliuos imuriin.	
Jäljennöslusikat Alginaatit	VirKon Desiol Perasafe	1 % peroksygeeni	Käsittelyaika	Liutus käyttöliuoksessa.	Peroksygeenien jälkeen huuhtelu vedellä.

1) EN12791 2) luvanvarainen

