



Cleanisept Wipes

Desinfektiopyyhe



Desinfektiopyyhepakkaus ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden ja välineiden pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin. Sisältää 100 kpl rullasta repäistävää pyyhettä.

Käyttökohteet

Lääkinnällisten laitteiden pintojen puhdistus ja desinfiointi. Pyyhkeet soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi ultraäänilaitteiden antureiden desinfektioon (mm. Siemens, Philips, GE, Shimadzu, SonoAce, Aloka, Toshiba, Esaote, Zonare, Hitachi, Weinmann, Compumedics). Elintarviketeollisuudessa ja ammattikeittiöissä tuotetta käytetään omavalvonnassa käytettävien tutkimusvälineiden (mm. lämpömittarit) desinfiointiin.

Ammattikäyttöön.

Tuoteominaisuudet

Pyyhkeet ovat nukkaamatonta kuitukangasta. Mikrobisidiseistä tehosta on saatavilla laajat tutkimustulokset (Bakteerit, sienet, homeet EN 13697, EN 13624, EN 13727, EN 1650, EN 1276, EN 1275, EN 1040, virukset: EN 14476 (Vaccinia, Polyoma), EN 16615 pyyhetesti). Desinfektioaineseos on pH:ltaan neutraali ja soveltuu myös herkille materiaaleille, esim. erilaiset muovit. Tuote on dermatologisesti testattu. Pakkaus sisältää 100 kpl rullasta repäistävää kertakäyttöistä kuitukangaspyyhettä, pyyhkeen koko 14 x 20 cm. Saatavana myös täyttöpakkaus (tuotekoodi 8085).

Käyttö- ja annostusohje

Muovipakkaus sisältää suljetussa pussissa olevan pyyherullan. Kierrä kansi auki, leikkaa halkio pussin yläsaumaan ja pujota pyyherullan pää kannen käyttöaukon läpi. Käyttö: Pyyhi kontaminoitunut alue ja anna sen kuivua. Pinnan voi tarvittaessa kuivata, mikäli se on kostea vielä 1 min. jälkeen. Desinfektioaineille herkimät materiaalit on suositeltavaa pyyhkiä päivittäin vedellä tai miedolla pesuaineella kostutetulla pyyhkeellä.

Huomioitavaa

Sulje kansi aina käytön jälkeen. Avattu pakkaus käytettävä 3 kk kuluessa.

Koostumus

Tehoaine

Vaikutus

Didecylmethylammoniumchlorid

desinfioiva tehoaine

Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid

desinfioiva tehoaine

Alkylethylbenzyldiemthylammoniumchlorid

desinfioiva tehoaine

Tuotteen pH

7.5 neutraali

Ulkonäkö ja tuoksu

Vaalea pyyhe, mieto tuoksu

Valmistusmaa

SAKSA

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi****Myyntierä****Tuotekoodi****GTIN**

12 x 1 kpl

8080

4260068629711

12 x 1 kpl

8085

4260068629704

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.com tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.