



Easydes Desinfektiopyyhe

Desinfektiopyyhe



Mikrobisidisesti tehokas, käyttövalmis ja nopeavaikutteinen desinfektiopyyhe alkoholeja sietäville ei-invasiivisille lääkinällisille laitteille ja infektioiden torjunnan kannalta kriittisille pinnoille.

Käyttökohteet

Terveysthuollon tutkimusvälineille, -laitteille ja pienien pintojen desinfectioon. Soveltuu tavanomaisille materiaaleille, myös useimmat muovit. Esim. stetoskoopit, kaukosäätimet, vetimet, laitteiden näppäimistöt, säätimet ja kosketuspinnat. Erinomainen myös kotisairaanhoidossa.

Ammattikäyttöön.

Tuoteominaisuudet

Pakkaus sisältää 16 pyyhettä. Mikrobisidisenä vaikuttajana pyyhkeissä on etanolipohjainen Easydes pesevä pintadesinfektioaine, joka on orgaanista räsistä kestävä, mikrobisidisesti laajatehoinen, ja nopeavaikutteinen desinfectioaineseos. Easydes tuhoaa tehokkaasti bakteerit, virukset ja fungit. Desinfectioteho saavutetaan myös näkyvästi kontaminoituneilla pinnoilla. Pyyhemateriaali on nukkaamatonta. Uudestaan suljettava pakkaus on hygieeninen käytössä.

Tuotteen mikrobisidinen teho on tutkittu: EN 16615 desinfectiopyyhkeelle (*S. aureus*, *P. aeruginosa*, *C. albicans*). Lisäksi Easydes Pesevän pintadesinfektioaineen tutkimustieto: EN 13727 (bakteerit), EN 13697 (bakteerit, hiivat, homeet), EN 13624 (hiivat, homeet), EN 14348 (tuberkuloosi ja mykobakteerit), EN 14476 (adeno- ja norovirus), EN 14561 (bakteerit), EN 14562 (hiivat, homeet), EN 14563 (mykobakteerit ja tuberkuloosi).

Käyttö- ja annostusohje

Pyyhi desinfectoitava laite/alue huolellisesti. Huomioi, että desinfectoitava pinta kostuu kauttaaltaan. Odota, että alkoholi on haihtunut pinnalta ennen laitteen seuraavaa käyttöönnottoa.

Pintoja ei yleensä tarvitse esipestä eikä huuhdella. Mikäli desinfectoidun pinnan on oltava ehdottoman jäämävapaa, voidaan pinta huuhdella tai pyyhkiä veteen kostutetulla taitoksella desinfectiion jälkeen. Desinfectio on tapahtunut, kun pyyhitty pinta on kuiva.

Huomioitavaa

Merkitse käyttöönottopäiväys pakkaukseen. Käytä avattu pakkaus 7 vrk kuluessa. Sulje pakkaus aina käytön jälkeen.

Noudata laitevalmistajien puhdistus- ja desinfectiointiohjeita.

Clostridium difficile epidemioissa suosittelemme käytettäväksi Klorilli tai Erisan Oxy+ desinfectioainetta, sillä alkoholipohjaiset tuotteet eivät tuhoa bakteeri-itiöitä.

Koostumus

Tehoaine

Vaikutus

Etanolia	60 p-%	biosidi
Tertiäärinen butanoli	< 2 %	denaturointiaine
Kvaternäärinen ammoniumkloridi	< 0,5 %	biosidi, puhdistusteho
Alkyyliamiinia	< 0,5 %	biosidi

Muu koostumus

Pyyhemateriaali 60 % polyester, 40 % viskoosi, pyyhekoko 200x135 mm. Käyttöpakkaus sisältää 16 kertakäyttöpyyhettä.

Tuotteen pH

10.0 heikosti emäksinen

Varastointi

Huoneenlämpö, 2v. valmistuksesta.

Valmistusmaa

SUOMI

**Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus**

Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi****Myyntierä****Tuotekoodi****GTIN****Myyntierän GTIN**

16 x 16 kpl

8285

6417964082852

6417964480818

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.com tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.