




## Erisan Oxy+ Desinfektioaine

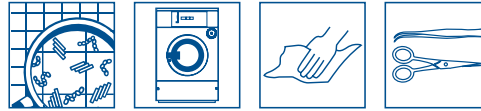

Vetyperoksidiin ja peretikkahappoon perustuva desinfektioaine lääkinnällisten laitteiden ja välineiden puhdistukseen ja desinfektioon, tekstiilien desinfektioon sekä veri- ja eritetahradesinfektioon. Desinfektioiteho aktivoituu vesiliuoksessa. Annospusseihin pakattu granuloitu jauhe.

### Käyttökohteet

Terveydenhoidon toimialue: Pintadesinfektio, instrumenttidesinfektio, veri- ja eritetahradesinfektio - lääkinnälliset laitteet ja välineet sekä kriittiset pinnat. Tekstiilien desinfiointi pesu 40 - 60°C normaalipituissa pesuohjelmissa.

Suun terveydenhuollossa voidaan käyttää myös hammasproteesien sekä tehoimujen desinfiointiin.

Voidaan käyttää pesevänä desinfektioaineena myös ultraäänipesulaitteissa.

Ammattikäyttöön.

### Tuoteominaisuudet

50 g:n kerta-annospussi on helppokäyttöinen. Granuloitu jauhe ei pölyä ja liukenee helposti lämpimään veteen. Desinfektio tapahtuu hapetusreaktion kautta.

Tuote sopii myös herkille pinnoille ja materiaaleille. Se soveltuu invasiivisten laitteiden ja välineiden esidesinfektioon ennen koneellista desinfiointia. Kupari-, hopea ja messinkipinnoille happea vapauttavat desinfektioaineet eivät sovellu.

Erisan Oxy+ Desinfektioaine on tutkitusti tehokas: EN 13727 bakterisidisen tehon tutkimus, EN 13697 bakteerit ja fungit, EN 13624 fungisidisen tehon tutkimus, EN 14348 tuberkuloosi ja mykobakteerit, EN 13704 itiöt, EN 14476 virusidinen teho (noro-, adeno- ja poliovirus), EN 14561 (bakteerit), EN 14562 (hiivat), EN 14563 (tuberkuloosi ja mykobakteerit), EN 16616 (tekstiilidesinfektio). Tuotteella on saavutettavissa high level- desinfektioitaso.

Käyttö 2 - 5 % liuoksena (50 g / 2,5 - 1 l vettä). Sekoita jauhe 30 - 40° C puhtaaseen veteen. Desinfektioaine on aktivoitunut, kun jauhe on liuennut ja vaahtopinta laskenut. Käytetty liuos on vaihdettava päivittäin.

Puhdas käyttöliuos säilyy: 2 % 1 viikko, 5 % 2 vrk.

**Käyttö- ja  
annostusohje**

| Käyttökohteet                                              | Erisan Oxy+                                                                  | Käyttö-<br>laimen-<br>nos | Vaikutusaika<br>Huom!                                                                                                                              | Puhtaan liuoksen säilyvyys |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Pintojen desinfektio, lääkinälliset laitteet               | 1 annospussi / 2,5 l vettä                                                   | 2 %                       | Työhön käytetty aika                                                                                                                               | 1 viikko                   |
| Eritetahradesinfektio                                      | 1 annospussi / 2,5 l vettä<br>1 annospussi / 1 l vettä                       | 2 %<br>5 %                | 2-vaiheinen<br>1-vaiheinen                                                                                                                         | 1 viikko<br>2 vrk          |
| Instrumenttien desinfektio (liotus), myös hammasproteesit  | 1 annospussi / 2,5 l vettä<br>1 annospussi / 1 l vettä                       | 2 %<br>5 %                | 2 % 30 min, 5 % 15 min kannellisessa astiassa. Huolellinen huuhtelu puhtaalla vedellä. Vaihda käytetty liuos päivittäin tai tarvittaessa useammin. |                            |
| High level desinfektio instrumenteille ja välineille       | 1 annospussi / 1 l vettä                                                     | 5 %                       | 30 min (polio ja itiöt) Huolellinen huuhtelu puhtaalla vedellä tai tarvittaessa steriilillä aqualla.                                               | 2 vrk                      |
| Instrumenttien pesu ja desinfektio ultraäänipesulaitteessa | 1 annospussi / 2,5 - 1 l vettä                                               | 2 - 5 %                   | 1 - 5 min pesuohjelma, kokonaisliotusaika 15 min.                                                                                                  | Vaihdettava päivittäin     |
| Hammashuollon tehoimujen desinfektio                       | Käytä 1 l valmista käyttöliuosta / tehoimu                                   | 2 %                       | Seuraavaan työpäivään, jonka alussa letkuston huuhtelu vedellä.                                                                                    |                            |
| Tekstiilien desinfioiva pesu                               | 1 pss ja n. ½ annosta pyykinpesujauhetta pesuaine-annostelijaan/5 kg pyykkiä | 0,5 %                     | 40 - 60°C pyykinpesuohjelma                                                                                                                        |                            |

**Huomioitavaa**

Käyttöliuoksen valmistuksen yhteydessä vesiliuoksen pinnalle muodostuu vaahtoa kemiallisen reaktion seurauksena. Tee käyttöliuos riittävän suuressa astiassa. Valmistaessasi 5 l käyttölaimennosta (2 %) kanisteriin, mittaa n. 2,5 l kädenlämpöistä vettä ja kaada kahden pussin sisältö tähän vesimäärään. Anna desinfektioaineen liueta veteen ja lisää vettä ad 5 l. Näin tuotteen aktivoitumisen seurauksena muodostuva vaahto ei nouse kanisterin suuaukolle. Sulje kanisterin korkki löyhästi.

Kovettunutta jauhetta ei tule käyttää.

Noudata laitevalmistajien erikoisohjeistuksia.

**Koostumus**
**Tehoaine**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Natriumperkarbonaatti | > 30 % |
| TAED                  | 5-15 % |
| Kompleksinmuodostajia | > 30 % |
| Ionittomia tensidejä  | < 5 %  |

**Käyttöliuoksen pH**

7.5 neutraali

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Varastointi                       | 2,5 v, 5 - 25°C lämpötila.                                                                                                                                                                                                                       |            |               |
| Ulkonäkö ja tuoksu                | Valkoinen granuloitu jauhe                                                                                                                                                                                                                       |            |               |
| Valmistusmaa                      | SUOMI                                                                                                                                                                                                                                            |            |               |
| Käyttö- ja ympäristö-turvallisuus | Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.<br>Tuote on biologisesti hajoava. Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.                                                                                                           |            |               |
| Pakkauskoko /<br>Tuotekoodi       | Myyntierä                                                                                                                                                                                                                                        | Tuotekoodi | GTIN          |
|                                   | 1 x 50 x 50 g                                                                                                                                                                                                                                    | 8116       | 6417964081169 |
| Lisätietoja                       | Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme <a href="http://www.kiiltoclean.com">www.kiiltoclean.com</a> tai asiakaspalvelustamme e-mail <a href="mailto:asiakaspalvelu@kiilto.com">asiakaspalvelu@kiilto.com</a> . |            |               |