



Klorilli

Erikoisdesinfektioaine



Kloramin T-pohjainen desinfektioaine desinfioivaan puhdistukseen, instrumentti- ja välinedesinfektioon sekä veri- ja eritetahradesinfektioon.

Käyttökohteet

Klorilli on orgaanista klooriyhdistettä sisältävä pesevä erikoisdesinfektioaine terveydenhoidon käyttöalueelle desinfioivaan puhdistukseen, instrumentti- ja välinedesinfektioon sekä eritetahradesinfektioon myös eristystilanteissa. Ammattikäyttöön.

Tuoteominaisuudet

Biosidisena tehoaineena on nestemäinen kloramin T. Valmisteen sisältämä orgaaninen klooriyhdiste tuhoaa tehokkaasti bakteereja, viruksia ja sieniä. Tuotteella on erinomainen lianirrotuskyky. Korkea pH pitää klooriyhdisteen sidotussa muodossa, valmisteen hajuttomana ja säilyvyyden hyvänä. Orgaaninen materiaali, lika ja mikrobit saavat pH:n alenemaan ja kloorin vapautumaan.

Mikrobisidisen tehon tutkimukset: EN 13727 (bakteerit), EN 13624 (hiivat), EN 13697 (bakteerit ja fungit), EN 14476 (polio-, adeno- ja norovirus) – täysi virusidinen teho.

Käyttö- ja annostusohje

Tee käyttölaimennos puhtaaseen, viileään (+20°C) veteen. Mittaa vesi ja Klorilli. Noudata ohjeeksi annettuja liotusaikoja. Välinliotuksessa tee uusi käyttölaimennos 1-2 kertaa viikossa. Vaihda käytössä oleva liuos, mikäli se on näkyvästi likaista. Huuhtelee välineet viileällä vedellä.

Pintadesinfektiossa huuhtelu ei yleensä ole tarpeen käytettäessä 500 - 1000 ppm pitoisuuksia.

Puhdas käyttölaimennos säilyy 4 viikkoa suljetussa astiassa ja käytettäessä One System Basic pyyhepakkausta.

Välineiden/instrumenttien esidesinfektioon Klorilli Erikoisdesinfektioainetta suositellaan silloin, kun pesu desinfioivassa pesukoneessa viivästyy tai ei ole mahdollista. Tällöin instrumentit upotetaan liuokseen kauttaaltaan.

Klorillin käyttö- ja laimennusohjeet

	ppm	%	Klorilli	Vesi	Vaikutus-aika	Huom!
Pintojen puhdistus ja desinfektio / pyyhintä (saniteetti- ja huoltotilat)	500	3	30 ml	9,7dl		
	1000	5	50 ml	9,5dl		
Eritetahradesinfektio	500-1000	3-5	30-50 ml	9,7-9,5 dl		2-vaiheinen
	5000	25	2,5 dl	7,5 dl		1-vaiheinen
Välinedesinfektio / upotus, eristys (pintapyyhintä)	5000	25	2,5 dl	7,5 dl	1 h	Huuhdellaan Pintapyyhinnässä vaikutusaika on työhön käytetty aika

Huomioitavaa

Käyttölaimennokset: Käytä erillisiä käyttölaimennospulloja ja -etikettejä. Merkitse etikettiin käyttölaimennoksen pitoisuus ja kelpoisuusaika.

Laimennusohjeita ja liotusaikoja noudattamalla, huolellisella huuhtomisella ja kuivaamisella minimoidaan korroosiovaikutuksia. Vältä roiskeita ja liian märkiä työskentelytapoja. Varmista, että käsiteltävä materiaali kestää kyseistä desinfektioainetta. Käytä asianmukaisia suojaimia.

Koostumus**Tehoaine****Vaikutus**

Dinatriummetasilikaattia	< 5 %	korroosiosuoja
Klooriamiini T	5 - 15 %	biosidinen tehoaine

Muu koostumus

Aktiiviklooripitoisuus 2 % = 20 000 ppm

Tuotteen pH

13.1 vahvasti emäksinen

Käyttöliuoksen pH

12.0 vahvasti emäksinen

Varastointi

5 - 25°C, 2 v.

Valmistusmaa

SUOMI

**Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus**

Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi****Myyntierä****Tuotekoodi****GTIN****Myyntierän GTIN**

6 x 1 l	8109	6417964081091	6417964482461
3 x 5 l	8110	6417964081107	6417964482478

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.com tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.