

Tuotetiedot

FD 333 pikadesinfiointiaine



FD 333 yhdellä silmäyksellä

- Aldehyditon, käyttöliuos lääkinnällisten tuotteiden pintojen pikadesinfiointiin vastaanotoilla, laboratorioissa ja sairaaloissa.
- Vaikutusaika VAH:n mukaan vain 1 minuutti, Tb-bakteerit mukaan lukien.
- Rajatusti virusidinen vaipallisia ja monia vaipattomia viruksia kuten adeno- ja noroviruksia vastaan.
- Testattu ajankohtaisten VAH-menettelmien ja eurooppalaisten standardien mukaan.
- Testattu 4-kenttätestissä VAH:n ja EN 16615:n mukaan.
- VAH-lista.
- Erinomainen yhteensopivuus materiaalien kanssa.
- Kuivu nopeasti jälkiä jättämättä.
- Miellyttävä tuoksu – raikas sitruuna.
- Käyttöä suositellaan erityisesti FD multi wipes- ja FD multi wipes compact -pyyhkeiden kanssa.

Ominaisuudet

Dürr System-Hygiene -tuotesarjan FD 333 on aldehyditon, käyttövalmis liuos invasiivisten ja ei-invasiivisten lääkinnällisten tuotteiden alkoholia kestävien pintojen pikadesinfiointiin vastaanotoilla, laboratorioissa ja sairaaloissa. FD 333 -tuotteelle on ominaista nopea vaikutus, hyvä yhteensopivuus materiaalien kanssa sekä monipuoliset käyttömahdollisuudet. FD 333 sopii hoitolaitteiden, instrumenttipöytien, instrumenttitasojen, intraoraalisten filmien suojusten, leikkausvalaisinten kahvojen sekä imuputkien desinfiointiin. Lisäksi FD 333 sopii hoitolaitteiden näppäimille tai XR-röntgenfilmin kehityslaitteille. FD 333 kuivu nopeasti. FD 333 -tuotteen käyttöä suositellaan erityisesti FD multi wipes- ja FD multi wipes compact -pyyhkeiden kanssa.

Koostumus

FD 333 -desinfiointiaineen vaikutus perustuu alkoholisten ja kvaternääristen ammoniumyhdisteiden yhdistelmään. 100 g FD 333 -desinfiointiainetta sisältää 62 g etanolia, 0,05 g didekyyli-dimetyyliammoniumkloridia, apuaineita ja vettä.

Mikrobiologinen teho

FD 333 vaikuttaa bakterisidisesti¹⁾, tuberkulosidisesti¹⁾, sieniä tuhoavasti¹⁾, rajoitetusti virusidisesti (vaipalliset virukset ml. HBV, HCV ja HIV^{2), 3)} sekä vaipattomat virukset kuten adenovirukset¹⁾ ja norovirukset^{1), 4)}. VAH-lista. Testattu EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 16615 mukaan.

Käyttö

Käytä FD 333 -tuotetta laimentamattomana. Annostele FD 333 -desinfiointiainetta liinalle ja kostuta pinnat kokonaan, tai suihkuta suoraan vaikeapääsyisille alueille. Kostuta desinfioitavat pinnat ja esineet kokonaan ja anna kuivua. Desinfioi pinnat, joilla on näkyvää likaa, FD 333 -tuotteella, ja poista lika liinalla. Desinfioi puhdistetut pinnat vielä kertaalleen. Anna valmisteeseen vaikuttaa. Käytä samanaikaisesti FD 333:lla kostutetuilla FD multi wipes- ja FD multi wipes compact -pyyhkeillä.

Tuotetiedot

FD 333 pikadesinfiointiaine

Ympäristövaikutukset

OECD-kriteerien 301 D mukaan FD 333 on biologisesti helposti hajotava. Polyeteenistä ja polypropeenista valmistetun pakkauksen materiaalin voi lämpökierrättää. Pullo on huuhdeltava vedellä ennen kierrätystä. Katso hävittämistä koskevat ohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Fysikaaliset ominaisuudet

Ulkonäkö: kirkas, väritön liuos

Tiheys: $D = 0,88 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ (20 °C)

Leimahduspiste: 22 °C (DIN 51755)

Säilyvyys

3 vuotta

Säiliön avaamisen jälkeen 3 vuotta, käytettäessä FD multi wipes-tai FD multi wipes compact -pyyhkeiden kanssa 3 kuukautta.

Pakkauskoot

10 l:n kanisteri

2,5 l:n pullo

1 l:n pullo

750 ml:n pullo Hygowipe Plussalle

Säilytys

Säilytä valmistetta vähintään 5 °C:n ja enintään huoneen lämpötilassa.

Tarvikkeet

Suihkupullo (600 ml), suihkepää 1 l:n pulloon, kanisterihana, FD multi wipes / FD multi wipes compact

Yleisiä ohjeita

Lääkinnällisten laitteiden kuten polymerointilamppujen, turbiinien sekä käsi- ja kulmakappaleiden ulkopinnat on desinfioitava valmistajan antamien määräysten mukaisesti. Varo käyttöä alkoholille herkkillä materiaaleilla (esim. akryylilasi). Testaa aineen yhteensopivuus herkkien materiaalien kanssa huomaamattomassa paikassa. Katso palo- ja räjähdysturvallisuutta koskevat ohjeet, DGUV 107-002 (BGR 206). FD 333 -tuotetta ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa. Tuotteen värin ja hajun muutokset ovat mahdollisia eri-

Myynti

Dürr Dental SE
Höpfheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Valmistaja

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de

Käyttö	Vaikutusaika
Pintadesinfiointi (VAH-menetelmät)¹⁾	1 min.
Bakteerit¹⁾ ja hiivasienet¹⁾	1 min.
Tb-bakteerit¹⁾	1 min.
Homesienet¹⁾	5 min.
Vaipalliset virukset ml. HBV, HCV, HIV^{2), 3)}	1 min.
Adeno-virukset¹⁾	1 min.
Noro-virukset^{1), 4)}	1 min.

1) Testattu vähäisessä kuormituksessa (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 16615, EN 14476).

2) Testattu adeno- ja MNV-viruksella (EN 14476) ml. vaipalliset virukset kuten HBV, HCV, HIV.

3) RKI-lausunnon mukaisesti (Bundesgesundheitsbl. 60, 353 - 363, 2017).

4) Testattu suuressa kuormituksessa (EN 14476).

tyisesti säilytettäessä tuotetta auringonvalossa. Näillä väri- ja hajumuutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen desinfiointitehoon.

Varoitukset

FD 333 on luokiteltu ja merkitty CLP-määräyksen mukaisesti: katso tuotemerkinnät ja käyttöturvallisuustiedote.

Riippumattomat lausunnot – omat tutkimukset

Lausunnot ovat saatavilla pyynnöstä.

CE 0124