



WipeClean Alco Free Disinfection Desinfektiopyyhe



CE
2797

Alkoholiton desinfektiopyyhe pintojen ja lääkinnällisten laitteiden desinfiointiin. Pakkauksessa 25 pyyhettä.

Käyttökohteet

Kosteapyyhintää sietävien pintojen ja ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden desinfiointiin terveydenhuollossa, ammattikäyttöön. Luokitus lääkinnällisen laitteen statuksen lisäksi: PT2 ja PT4 biosidivalmiste ammattikäyttöön.

Tuoteominaisuudet

Laajakirjoisesti tehokas desinfektioaineseos, tehoalueena bakteerit, fungit, virukset, itiöt, tuberkuloosi ja mykobakteerit. Tuotteen mikrobisidinen teho on tutkittu: Bakteerit: EN 13727 (1 min), EN 13697 (1 min), EN 16615 (1 min), fungit: EN 13624 (2 min), EN 13697 (hiivat, 2 min), EN 16615 (hiivat, 1 min), virukset: EN 14476 (noro- ja adenovirus, 1 min), tuberkuloosi ja mykobakteerit EN 14348 (1 min), itiöteho EN 13704 (2 min).

Kuitukangaspyyhe, 50 gsm (1 m* 1m) 100% polyesteriä, vapauttaa desinfektioaineen tehokkaasti käyttöön. Pehmeä, sopivan paksuinen pyyhemateriaali puhdistaa ja kostuttaa desinfioitavat pinnat hyvin. Pyyhekoko 20 x 30 cm.

Pakkaus on helppo avata ja sulkea uudelleen. Kansiosassa on merkintäalue käyttöönottopäiväykselle. Avatun pakkauksen käyttöaika max. 6 kk.

Käyttö- ja annostusohje

Pyyhi desinfioitava laite/alue huolellisesti, desinfioitavan pinnan on oltava kauttaaltaan kosketuksissa desinfektioaineeseen. Odota, että kosteus on haihtunut pinnalta ennen laitteen seuraavaa käyttöönottoa. Pintoja ei yleensä tarvitse esipestä eikä huuhdella. Mikäli desinfioitavan pinnan on oltava ehdottoman jäämävapaa, voidaan pinta huuhdella tai pyyhkiä veteen kostutetulla taitoksella desinfioinnin jälkeen. Sulje pakkaus aina käytön jälkeen.

Pyyhe riittää 1 m² alueen desinfiointiin.

Koostumus

Tehoaine

Vaikutus

DDAC	6,4 g/kg	desinfointiaine
Triamine	5,31 g/kg	desinfointiaine

Varastointi

Säilytä pakkaukset kuivassa, jäätymättömässä tilassa, suoralta auringonvalolta suojattuna. Huoneenlämmössä 3 v.

Ulkonäkö ja tuoksu

Valkoinen pyyhemateriaali, miesto tuoksu

Valmistusmaa

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

**Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus**

Ei suositella luonnonkumille ja pahvipinnoille. Tarkista laitevalmistajan ohjeistukset desinfiointiin ennen tuotteen käyttöä. Käytä suojakäsineitä.

Pyyhemateriaali on polyesteriä. Pyyhepakkaus on ulkokuoreltaan pet/pe muovia. Pyyhepakkaus ja pyyhkeet ovat energia- tai yhdyskuntajaetta.

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi**

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
20 x 25 pyyhettä	5203	5701684520321	5701684520314

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.com tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.