

**Sterisolin uusi automaattinen annostelija –
Kehitetty sairaanhoidon ja hygieniaa
vaativien ympäristöjen tarpeita varten**

**Uutuus
Sterisolilta!**

Tarvikkeet



Sterisol

- Ilman säilöntäaineita

Monipuolinen automaattinen annostelija,
jossa mahdollisuus verkko- tai paristokäyttöön
käyttöhäiriöiden vähentämiseksi



Automaattinen annostelija paristo tai verkkoliitännällä.

Sterisolin automaattinen annostelija on kehitetty toimimaan kaikissa ympäristöissä, jonne on asetettu korkea vaatimus käsihygieniaan. Se että käyttäjä ei koskaan joudu koskemaan annostelijaan, antaa suurimman mahdollisen hygieenisyyden sekä sairaalaympäristössä, jossa on korkeat hygieniavaatimukset, että teollisuusympäristössä.

Automaattiannostelija toimitetaan paristokäyttöisenä (ilman paristoja).

EMC- testattu ja hyväksytty. Ei häiritse muiden elektronisten laitteiden käyttöä esim. sairaaloissa tai teollisuudessa. Verkkoliitännää varten tarvitsee verkkolaitteen (tilattavissa erikseen, Tuote nro 4545) Katso alhaalta.

Turvallinen käyttäjille

- Ei puristumisvaaraa – Annostelijan painikkeeseen ei pääse käsiksi annostelun aikana
- Turvallinen pussin vaihdon yhteydessä – Virta kytkeytyy pois kannen avaamisen yhteydessä
- Turvallinen käyttää käsihuuhteen kanssa. Koska annostelija on varustettu sulakkeella, teline ei voi aiheuttaa syttymistä oikosulun aikana. Tämä on tärkeää koska annostelijassa on usein alkoholia/etanolia.

Annostelu

Aseta sormet tiiviisti yhteen ja laita käsi annostelijan alle. Yksi annos on 1,5 - 1,8 ml tuotteesta riippuen.

Paristojen käyttöikä ja huolto automaattiannostelijassa

Paristot riittävät n.30 000 annostukseen tai 1 vuoden. Sininen valo alkaa vilkkua annostelijan alareunassa kun on aika vaihtaa paristot.

Huolto Annostelijan kannen voi pestä astianpesukoneessa (myös huuhtelu- ja desinfiointikoneessa).

Verkkoon liitetty annostelija:

Enintään 6 annostelijaa voi liittää yhteen verkkolaitteeseen. Sarjakytkenässä suurin etäisyys verkkolaitteen ja kauimpana olevan annostelijan välillä saa olla enintään 10 metriä. Johtosarja, joka tulee verkkolaitteen mukana on 3 metriä. Sähköasentajan tulee asentaa johtosarjan pituus ja sarjakytkenä.

Kuiva tai kostea ympäristö:

- Kuiva(ei kostea) tila: verkkolaite IP20

Tekniset tiedot

- Mitat: K: 228 mm – L: 117 mm – S: 130 mm
- Paristot: 4 x AA-1,5V · Sulake: T 1,5A

Verkkolaitteen tekninen erittely:

- Jännite: 6 V DC
- Virta: > 1,5 A
- Tyyppi: Suojattu ja vakautettu.
(Tarkoittaa että jännite on vakio ilman piikkejä huolimatta verkkojännitteen vaihtelusta)

Turvallisuus:

- Annostelija on jännitteetön kun päällyskansi avataan huoltoa tai tuotteen vaihtoa varten/täyttöä varten.
- EMC- testattu ja hyväksytty
- IP - luokka 20 – annostelija.

0,7l Automaatti

Mitat: Korkeus 228 mm x Leveys 117 mm x Syvyys 130 mm.



Huom!
suunniteltu
Sterisolin 0,7 l:n
tuotteille!

Sterisol Automaattiannostelija 0,7 l

Valkoinen kotelo ja läpinäkyvä kansi joka on osin maalattu sisäpuolelta. Toimitetaan paristokäyttöisenä (ilman paristoja).

Tuote nro 4546



Verkkolaite Automaatti- annostelijaan 220/6V

Valkoinen iskunkestävä muovi, tarkoitettu kuivassa tilassa käytettäväksi.

Tuote nro 4545