

FD 360

Tekonahan puhdistus ja hoito



FD 360 puhdistaa ja hoitaa kaikkia tekonahasta valmistettuja tuolinpäällisiä ja auttaa siten merkittävästi ylläpitämään toimenpidetuolien ja muiden tekonahkapäällisten kuntoa. Käyttämällä samanaikaisesti FD 360 -puhdistusainetta ja saraan kuuluvaa erikoissientä voidaan nopeasti ja syvävaikuttaisesti poistaa myös vaikeasti puhdistettavat liat, tahrat tai esimerkiksi vaatteissa olevien väriaineiden aiheuttamat värjäytymät. FD 360 hoitaa ja puhdistaa tehokkaasti ja jäämiä jättämättä. Lopputulos on silkisen kiiltävä.

Koostumus: FD 360 -puhdistusaineen vaikutus perustuu erikoistensidin, silikoniyhdisteiden ja avokadoöljypohjaisten hoito-osien seokseen.

Käyttö: Käytä FD 360 -puhdistusainetta laimentamatto - mana. Suihkuta FD 360 -puhdistusainetta puhdistettaville pinnoille ja pyyhi välittömästi liinalla. Puhdistusta voidaan tehostaa hankamalla erikoissienellä. Tämä saa aikaan perusteellisemman ja syvävaikutteisen puhdistuksen. Sen jälkeen pyyhitään ylimääräinen FD 360 pois kuivalla rievulla. Käytä FD 360 -puhdistusainetta päivittäin.

Ohjeita: FD 360 -puhdistusainetta voidaan ongelmitta käyttää kaikille tekonahkapinnoille. Puhdistusaineen sopivuus muille nahkapinnoille on ennen käyttöä tarkistettava piilossa olevalla pinnalla. Erikoissieniä ei saa käyttää nahalle.