

Instrumenttien tehokas erikoispuhdistusaine



Tehokas instrumenttien puhdistusaine, sopii erityisesti pinttyneen lian, ruostepilkkujen ja tummentumien poistoon metallipinnoilta.

Sopii myös alumiinipinnoille.

- ♦ Erinomainen ruosteen poistoon, mm. saksien/pihtien nivelkohdista
- ♦ Kuivuneen veren poistoon, myös jo steriloiduista välineistä
- ♦ Teippien liiman poistoon
- ♦ Silikonitahrojen poistoon
- ♦ Sopii myös kontainereiden ja tarjottimien tummentumien puhdistukseen

Tuotetta ei saa käyttää optiikkalinsseille!

Aine on maitomainen ja vesiliukoinen, sekä ei sisällä liuottimia

Käyttöohje:

Levitä ainetta kuivalla taitoksella tai harjalla ja hankaa lika pois.

Puhdistuksen jälkeen pese instrumentit instrumenttien pesukoneessa.