




Erinox

Erikoispesuaine

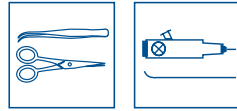

Erikoispesuaine terveydenhuollon ja hammashuollon instrumenttien ja välineistön käsinpesuun, ultraäänipesulaitteisiin sekä endoskooppien pesuun.

Käyttökohteet

Ultraäänipesulaitteisiin, endoskooppien esipesuun, instrumenteille, hoitovälineistölle, laboratoriovälineille, herkälle lasitavaralle.

Tuoteominaisuudet

Irrottaa tehokkaasti epäpuhtauksia ja rasvalikaa. Se sopii hyvin myös herkkien materiaalien puhdistukseen. Matalavaahtoinen erikoispesuaine instrumenttien ja hoitovälineistön puhdistukseen manuaalisesti ja ultraäänipesulaitteissa.

Käyttö- ja annostusohje

Valmista ohjeen mukainen käyttölaimennos. Liuos vaihdetaan päivittäin. Käsin suoritettavassa puhdistuksessa käyttölaimennos tehdään jokaista huoltotoimenpidettä varten erikseen. Pestyt välineet huuhdellaan ja kuivataan. Aseta välineet väljästi ultraäänipesulaitteeseen, pesulämpötila likatyyppistä riippuen max. 50 °C. Huuhtelee välineet pesun jälkeen. Tarvittaessa desinfioi välineet ennen pesua.

Erinox käyttö- ja laimennos ohjeet

	%	Erinox	Vesi	Huom!
Ultraäänipesulaitteet	1 % - 2 %	10 ml 20 ml	1 l 1 l	vaihda laimennos 1-2 x pv esiliotus tarvittaessa 2 %
Käsin suoritettava pesu				
- endoskoopit	2 %	20 ml	1 l	
- muu välineistö	1- 2 %	10- 20 ml	1 l	
Peruspesu/vaikea lika	5%	50 ml	0,95l	

Huomioitavaa

Tarvittaessa desinfioi välineet ennen pesua. Vaihda käyttölaimennos päivittäin. Käsin suoritettavassa pesussa tee käyttölaimennos jokaista huoltotoimenpidettä varten erikseen.

Koostumus

Tehoaine

Vaikutus

Ionittomia tensidejä	< 5%	pesuteho
Polykarboksylaattia	<5%	dispergoi likaa, kompleksinmuodostaja

Tuotteen pH

10.0 heikosti emäksinen

Käyttöliuoksen pH

10.0 heikosti emäksinen

Ulkonäkö ja tuoksu

Kirkas neste

Valmistusmaa	SUOMI			
Käyttö- ja ympäristö-turvallisuus	Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta. Helposti biologisesti hajoava.			
Pakkauskoko / Tuotekoodi	Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
	6 x 1 l	8113	6417964081138	6417964483536
	3 x 5 l	8114	6417964081145	6417964483543
	1 x 200 l	8148	6417964081480	
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.com tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com .			