




Hydragel

Esikäsittelyaine

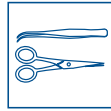

Lian kiinni kuivumista sekä mikrobien lisääntymistä ja leviämistä estävä esikäsittelyaine instrumenteille.

Käyttökohteet

Esikäsittelytuote tilanteisiin, joissa instrumentteja ei pestä välittömästi käytön jälkeen. Hydragel estää orgaanisen lian kiinnittymisen ja kuivumisen sekä mikrobien lisääntymisen käytetyissä instrumenteissa.

Ammattikäyttöön.

Tuoteominaisuudet

Helposti levittyvä geelimäinen suihke muodostaa instrumenttien pinnalle mikrobeja läpäisemättömän pinnan. Geelikalvo estää lian kuivumisen kiinni instrumentteihin sekä mikrobien lisääntymisen ja leviämisen. Vaikutus kestää 5 vrk. Tuotetta voidaan käyttää tarvittaessa myös pesutehosteena hankalasti puhdistuville instrumenteille. Sopii yleisesti käytössä oleville materiaaleille. Hydragel on vesiliukoinen ja huuhtoutuu hyvin instrumenttien pinnalta.

Käyttö- ja annostusohje

Käytä kannellista säilytys/kuljetuslaatikkoa. Sumuta esikäsittelyainetta kuljetuslaatikossa olevien instrumenttien päälle. Noudata turvallisia työtapoja instrumenttien säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Pese instrumentit normaaliin tapaan.

Huomioitavaa

Esikäsittelyaineen alle ei saa jäädä kemikaaleja, jotka voivat syövyttää tai vaurioittaa metalleja. Noudata laitevalmistajien erikoisohteistuksia. Puhdista roiskeet vedellä. Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Koostumus

Tehoaine

Rasvahappojen
alkanoliainosuolet 5 - 15%

Ionittomia tensidejä < 5%

Säilöntäainetta

Korroosionestoainetta

Vaahdonestoainetta

Tuotteen pH

9.0 heikosti emäksinen

Varastointi

<28°C. Säilyy 3 v. valmistusajankohdasta.

Valmistusmaa

SUOMI

Käyttö- ja ympäristö- turvallisuus

Tuote on biologisesti hajoava. Raaka-aineet ovat ympäristömyönteisiä. Pakkaukset valmistetaan PE-HD -muovista, joka on ympäristömyönteinen, täysin kierrätyskelppoinen ja poltettava materiaali.

Pakkauskoko / Tuotekoodi

Myyntierä

Tuotekoodi

GTIN

Myyntierän GTIN

6 x 750 ml

8222

6417964082227

6417964482959

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.com tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.