




Steel

Hapan erikoispesuaine

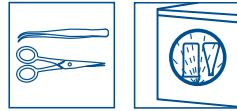

Hapan erikoispesuaine kalkki- ja ruostesaostumien sekä oksidikalvojen poistoon terveydenhuollon instrumenttipesukoneista ja instrumenteista.

Käyttökohteet

Välinehuollon erikoistuote: Soveltuu manuaalisiin ja koneellisiin menetelmiin, myös käytettäväksi ultraäänipesulaitteissa. Ruostumaton teräs, muovit, silikonimateriaali, useimmat alumiini-, messinki- ja kuparimateriaalit.

Ammattikäyttöön.

Tuoteominaisuudet

Steel on erikoistuote instrumenttipesukoneiden ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen instrumenttien pinnan kalkki- ja ruostesaostumien sekä oksidikalvojen poistoon. Poistaa tahroja myös silikonin- ja muovipinnoilta. Steel poistaa saostumat ja kirkastaa metallipinnat. Tuote huuhtoutuu pinnoilta hyvin.

Käyttö- ja annostusohje

Instrumenttikoneen puhdistus: 100-300 ml (0,5 - 1,5 % laimennos), kalkinpoisto-ohjelma. Jos käytetään muita pesuohjelmia, on varmistettava, ettei muita pesuaineita käytetä samanaikaisesti. Instrumenttien puhdistus: 20 % käyttöläimennos (2 dl/0,8 l vettä) lämpimään veteen, 30 min - 1 h liotusaika. Jos saostumaa jää instrumentteihin, pyyhi pinta. Pese ja huuhtelee instrumentit heti liotuksen jälkeen. Ultraäänipesulaitteessa: 20 ml - 200 ml/1 - 0,8 l lämmintä vettä. Instrumenttien liotus 30 min, jonka jälkeen ohjelman kesto 10 min, huolellinen huuhtelu.

Huomioitavaa

Käytetty liuos vaihdetaan päivittäin. Hapan tuote. Ei saa sekoittaa klooripitoisten aineiden kanssa. Korroosioaurioiden välttämiseksi tuote ei saa kuivua pinnoille.

Koostumus

Tehoaine

Vaikutus

Orgaanisia happoja	15-30 %	liuottaa saostumat
Glykolieetteriä	5-25 %	liuotin, lisää puhdistustehoa
Ionittomia tensidejä	< 5 %	pinnan kostuttaja, pesuaktiiviaine

Tuotteen pH

1.5 vahvasti hapan

Käyttöliuoksen pH

3.0 hapan

Varastointi

Säilytettävä huoneenlämmössä, käyttö 3 v. valmistusajankohdasta.

Ulkonäkö ja tuoksu

Kirkas neste, ominainen tuoksu

Valmistusmaa

SUOMI

Pakkauskoko / Tuotekoodi

Myyntierä

Tuotekoodi

GTIN

Myyntierän GTIN

6 x 1 l

8224

6417964082241

6417964482935

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.com tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.