






TUOTE	KÄYTTÖKOHDDE	TARKENNUKSEN KÄYTTÖ-KOHTEESEEN	KÄYTTÖ-PITOISUUS (%)	VAIKUTUS-AIKA	MILLOIN KÄYTETÄÄN	OHJEITA JA HUOMIOITA	PAKKAUKSET	
	<b>Orbis pesuneste</b>	Käsienpesuun	100 %		Pese aina näkyvästi likaiset kädet.	Kastele kädet, hiero saippua huolellisesti ja huuhtele.	MD121942 Pumpupullo 0,5 L MD121940 Dispensopac 1 L	
	<b>Orbis käsihuuhde</b>	Käsien desinfiointiin	100 %	3-5 ml, 30 s 3-5 ml, 60 s	Ennen potilaskosketusta tai toimenpidettä sekä sen jälkeen. Hoitotapahtuman aikana aseptisen työjärjestyksen mukaisesti. Ennen hoitoympäristöön menemistä ja sieltä poistuttaessa.	30 s hygieeninen käsien desinfektio 60 s kirurginen käsien desinfektio	MD121941 Pumpupullo 0,5 L MD121939 Dispensopac 1 L MD173313 Kanisteri 5 L MD168794 Pumpu 5 L kanisteriin	
	<b>Orbis suojavaoide ja Orbis balsami</b>	Käsien ihon suojaukseen ja kosteutekseen		100 %		Tarvittaessa		R200536 Suojavaoide 100 ml R200535 Balsami 100 ml
	<b>Orbis nopeasti tehoava desinfektioaine</b>	Pinnoille ja hoitoyksiköille	Alkoholia kestäville pinnoille	100 %	Kuivumisaika	Jokaisen potilaan jälkeen	Nihkeä pyyhintä, purista ylimääräinen neste liinasta.	MD121936 Keinukorkkipullo 0,5 L MD121937 Kanisteri 5 L MD168794 Pumpu 5 L kanisteriin
	<b>Orbis nopeasti tehoava desinfektioaine Wipes</b>						Orbis nopeasti tehoava desinfektioaine valmiiksi imeytettynä liinoihin (20 x 20 cm).	MD125294 Säiliö + liinat 150 kpl MD125295 Refill liinat 100 kpl
	<b>Orbis ORBI-Sept Wet Wipes Sensitive</b>	Pinnoille ja hoitoyksiköille	Herkille pinnoille	100 %	Kuivumisaika	Käytön jälkeen	Orbis nopeasti tehoava sensitive -desinfektioaine valmiiksi imeytettynä liinoihin (20 x 30 cm).	R201388 Liinat 80 kpl
	<b>Orbis ORBI-Sept pintojen desinfiointi- tiiviste</b>	Hoituhuoneen yleis- siivoukseen	Verhoiluille, lattioille tai ei-invasiivisille lääkinnällisille laitteille	0,5-3 %	15-60 min	Päivän päätteeksi	Kontaminoimaton liuos pysyy käyttökelpoisena n. 30 päivää. Puhdistusainejäämien ehkäisemiseksi pyyhi pinnat kerran viikossa pelkällä vedellä.	MD169158 Pullo 2,5 L
<b>Orbis Dry Wipes</b>	Pintojen pyyhkimiseen					Kuivat pyyhintäliinat (20 x 20 cm). Lisää desinfektioaine pakkauksen ohjeen mukaan.	MD164517 Säiliö + liinat 150 kpl MD164518 Refill liinat 100 kpl	
	<b>Orbis ORBI-Sept tehoimun pesu- ja desinfiointitiiviste</b>	Imulaitteistolle		2 %		1-2 krt/päivä	Annostele 20 ml tiivistettä 980 ml vettä. Laimennettu liuos imetään imujärjestelmään.	MD164014 Pullo 2,5 L
	<b>Orbis imulaitteiston erikoispuhdistus- tiiviste</b>	Imulaitteistolle		5 %		1-2 krt/viikko	Annostele 100 ml tiivistettä 1900 ml vettä. Anna vaikuttaa 30 min. Puhdistuksen jälkeen imulaitteisto huuhdellaan litralla vettä.	M123926 Pullo 2,5 L
	<b>Orbis tehoimun suodatin</b>					Puhdistetaan päivittäin, vaihdetaan viikoittain		MD166455 Suodattimet 12 kpl
	<b>Orbis sylkykupin puhdistus- ja desinfiointiaine</b>	Sylkykupille; soveltuu myös WC-tilojen puhdistukseen		100 %	Vähintään 1 min	1-2 krt/päivä	Annostele, anna vaikuttaa ja huuhtele.	MD115211 Kaatonokkapullo 750 ml
	<b>Orbis ORBI-Sept jäljennösten desinfiointiaine</b>	Alginaatti-, silikoni- ja polyeteeri- jäljennöksille	Uputusdesinfektio	100 %	1 min	Jäljennöksen ottamisen jälkeen	Desinfioi aina jäljennökset ennen labraan lähettämistä. Upota alginaatit ja hydrokolloidit hetkeksi ja anna kuivua. Huuhtele jäljennös sen jälkeen vedellä. Noudata tarkoin vaikutusaikaa.	MD168125 Pullo 2,5 L
	<b>Orbis Tray Cleaner jäljennöslusikoiden puhdistustiiviste</b>	Instrumenttien puhdistamiseen jäljennösaineista	Irrottaa alginaatti-, sinkkioksidieugenoli-, karboksylaatti- ja fosfaattisementti- jäämät sekä termoplastiset vahat mm. jäljennöslusikoista	5-10 %, tarvittaessa 100 %	45 min	Tarvittaessa	Upota puhdistettavat instrumentit liukseen. Liuos soveltuu myös ultraäänipesulaitteeseen.  Sopii ruostumattomille materiaaleille. Huom! Älä laita kromia, nikkeliä tai alumiinia sisältäviä tuotteita samaan liukseen korrosiovaaran vuoksi.	MD117137 Orbis Tray Cleaner 1 L
	<b>Orbis ORBI-Sept instrumenttien desinfiointitiiviste</b>	Instrumenteille, juurihoitoneuloille	Uputusdesinfektio	1,5-1 %	15-60 min*	Heti käytön jälkeen	Puhdista näkyvästi likaiset instrumentit ennen upotusdesinfektioita. Vaikutusajan jälkeen huuhtele ja kuivaa hyvin.  Käyttöliuos vaihdetaan päivittäin tai kun liuos on silminnähtävien likaista. Ultraäänipesulaitteen dekantterilasin desinfiointineste vaihdetaan joka käyttösyklin jälkeen.	MD168461 Pullo 2,5 L
	<b>Orbis esikäsittelyaine</b>	Suoja-aine instrumenteille		100 %	Maks. 4 vrk	Tarkoitettu käytettäväksi instrumenteille, jotka eivät päädy pesuun tai dekontaminoivaan liukseen heti käytön jälkeen	Aseta instrumentit kuljetuslaatikkoon. Suihkuta esikäsittelyainetta instrumenttien päälle. Huolehdi instrumenttien riittävästä kastumisesta. Huuhtele ennen jatkokäsittelyä.	MD163276 Suihkupullo 1 L
	<b>Orbis käyttövalmis liuos instrumenteille</b>	Instrumenteille		100 %	20 min-3 h	Käyttövalmis kylmädesinfektioineste. Soveltuu erityisesti kuumuudelle herkille materiaaleille ja instrumenteille. Käyttöalueena ei-invasiiviset instrumentit ja -välineet, kuten valokuvauspeilit, oikomispihdit ja porat.	Upota instrumentit huolellisesti liukseen ja huuhtele vaikutusajan päätyttyä. Liuoksen maks. käyttöaika 30 vrk.	MD163277 Kanisteri 5 L 72130 Instrumenttien liuotussallas
	<b>Orbis ORBI-Sept porien desinfiointi- tiiviste</b>	Pyöriville instrumenteille	Kaikille porille, mm. timanteille, freesareille ja finiireille	100 %	5 min	Heti käytön jälkeen	Sisältää korrosionestoainetta. Pyörivien instrumenttien desinfiointiin suositellaan käytettäväksi ultraäänilaitetta.	MD168176 Pullo 2,5 L 67413 Poranpuhdistuskuppi
<b>Muut merkinnät</b>								

\*1 TbB 3 % 60 min, TbB 4 % 30 min.

Tutustu kaikkien tuotteiden käyttöohjeisiin huolella. Hygieniaohjeistus on suuntaa antava. Vastaanotto on vastuussa hyväksyttävän ja riittävän hygieniakäytännön toteutuksesta.

Päiväys \_\_\_\_\_

Hygieniaavastaava \_\_\_\_\_