







TUOTE	KÄYTTÖKOHDE	TARKENNUS KÄYTTÖ-KOHTEESEEN	KÄYTTÖ-PITOISUUS (%)	VAIKUTUS-AIKA	MILLOIN KÄYTETÄÄN	OHJEITA JA HUOMIOITA	PAKKAUKSET	
	Orbis pesuneste	Käsienpesuun	100 %		Pese aina näkyvästi likaiset kädet.	Kastele kädet, hiero saippua huolellisesti ja huuhtele.	MD121942 Pumpupullo 0,5 L MD121940 Dispenco pac 1 L	
	Orbis käsihuhde	Käsien desinfiointiin	100 %	3-5 ml, 30 s 3-5 ml, 60 s	Ennen potilaskosketusta tai toimenpidettä sekä sen jälkeen. Hoitotapahtuman aikana aseptisen työjärjestyksen mukaisesti. Ennen hoitoympäristöön menemistä ja sieltä poistuttaessa.	30 s hygieeninen käsien desinfektio 60 s kirurginen käsien desinfektio	MD121941 Pumpupullo 0,5 L MD121939 Dispenco pac 1 L MD173313 Kanisteri 5 L MD168794 Pumpu 5 L kanisteriin	
	Orbis käsivoiteet	Käsien ihon kosteutukseen		100 %		Tarvittaessa		R200535 Balsami 100 ml R302804 Suojaava käsivoide 100 ml
	Orbis nopeasti tehoava desinfektio-aine	Pinnoille ja hoitoyksiköille	Alkoholia kestäville pinnoille	100 %	Kuivumisaika	Jokaisen potilaan jälkeen	Nihkeä pyyhintä, purista ylimääräinen neste liinasta.	MD121936 Keinukorkkipullo 0,5 L MD121937 Kanisteri 5 L MD168794 Pumpu 5 L kanisteriin
	Orbis nopeasti tehoava desinfektio-aine Wipes						Orbis nopeasti tehoava desinfektioaine valmiiksi imeytettynä liinoihin (20 x 20 cm).	MD125294 Säiliö + liinat 150 kpl MD125295 Refill liinat 100 kpl
	Orbis ORBI-Sept Wet Wipes Sensitive	Pinnoille ja hoitoyksiköille	Herkille pinnoille	100 %	Kuivumisaika	Käytön jälkeen	Orbis nopeasti tehoava sensitive -desinfektioaine valmiiksi imeytettynä liinoihin (20 x 30 cm).	R201388 Liinat 80 kpl
	Orbis ORBI-Sept pintojen desinfiointi-tiiviste	Hoituhuoneen yleis-siivoukseen	Verhoiluille, lattioille tai ei-invasiivisille lääkinnällisille laitteille	0,5-3 %	15-60 min	Päivän päätteeksi	Kontaminoimaton liuos pysyy käyttökelpoisena n. 30 päivää. Puhdistusainejäämien ehkäisemiseksi pyyhi pinnat kerran viikossa pelkällä vedellä.	MD169158 Pullo 2,5 L
	Orbis Dry Wipes	Pintojen pyyhkimiseen					Kuivat pyyhintäliinat (20 x 20 cm). Lisää desinfektioaine pakkauksen ohjeen mukaan.	MD164517 Säiliö + liinat 150 kpl MD164518 Refill liinat 100 kpl
	Orbis ORBI-Sept tehoimun pesu- ja desinfiointitiiviste	Imulaitteistolle		2 %		1-2 krt/päivä	Annostele 20 ml tiivistettä 980 ml vettä. Laimennettu liuos imetään imujärjestelmään.	MD164014 Pullo 2,5 L
	Orbis imulaitteiston erikoispuhdistus-tiiviste	Imulaitteistolle		5 %		1-2 krt/viikko	Annostele 100 ml tiivistettä 1900 ml vettä. Anna vaikuttaa 30 min. Puhdistuksen jälkeen imulaitteisto huuhdellaan litralla vettä.	M123926 Pullo 2,5 L
	Orbis tehoimun suodatin						Puhdistetaan päivittäin, vaihdetaan viikoittain	MD166455 Suodattimet 12 kpl
	Orbis sylkykupin puhdistus- ja desinfiointiaine	Sylkykupille; soveltuu myös WC-tilojen puhdistukseen		100 %	Vähintään 1 min	1-2 krt/päivä	Annostele, anna vaikuttaa ja huuhtele.	MD115211 Kaatonokkapullo 750 ml
	Orbis ORBI-Sept jäljennösten desinfiointiaine	Alginaatti-, silikoni- ja polyeteeri-jäljennöksille	Upotusdesinfektio	100 %	1 min	Jäljennöksen ottamisen jälkeen	Desinfioi aina jäljennökset ennen labraan lähettämistä. Upota alginaatit ja hydrokolloidit hetkeksi ja anna kuivua. Huuhtele jäljennös sen jälkeen vedellä. Noudata tarkoin vaikutusaikaa.	MD168125 Pullo 2,5 L
	Orbis Tray Cleaner jäljennöslusikoiden puhdistustiiviste	Instrumenttien puhdistamiseen jäljennösaineista	Irrottaa alginaatti-, sinkkioksidieugenoli-, karboksylaatti- ja fosfaattisementti-jäämät sekä termoplastiset vahat mm. jäljennöslusikoista	5-10 %, tarvittaessa 100 %	45 min	Tarvittaessa	Upota puhdistettavat instrumentit liuokseen. Liuos soveltuu myös ultraäänipesulaitteeseen. Sopii ruostumattomille materiaaleille. Huom! Älä laita kromia, nikkeliä tai alumiinia sisältäviä tuotteita samaan liuokseen korroosiovaaran vuoksi.	MD117137 Orbis Tray Cleaner 1 L
	Orbis ORBI-Sept instrumenttien desinfiointitiiviste	Instrumenteille, juurihoitoneuloille	Upotusdesinfektio Soveltuu myös ultraäänipesulaitteeseen sekä ultraäänipesulaitteen pääältaan liuokseksi	1,5-1 %	15-60 min*	Heti käytön jälkeen	Puhdista näkyvästi likaiset instrumentit ennen upotusdesinfektioita. Vaikutusajan jälkeen huuhtele ja kuivaa hyvin. Käyttöliuos vaihdetaan päivittäin tai kun liuos on silminnähtävästi likaista. Ultraäänipesulaitteen dekanterilasien desinfiointineste vaihdetaan joka käyttösyklin jälkeen.	MD168461 Pullo 2,5 L 72130 Instrumenttien liuotusallas
	Orbis esikäsitelyaine	Suoja-aine instrumenteille		100 %	Maks. 4 vrk	Tarkoitettu käytettäväksi instrumenteille, jotka eivät päädy pesuun tai dekontaminoivaan liuokseen heti käytön jälkeen	Aseta instrumentit kuljetuslaatikkoon. Suihkuta esikäsitelyainetta instrumenttien päälle. Huolehdi instrumenttien riittävästä kastumisesta. Huuhtele ennen jatkokäsittelyä.	MD163276 Suihkepullo 1 L
		Orbis ORBI-Sept porien desinfiointi-tiiviste	Pyöriville instrumenteille	Kaikille porille, mm. timanteille, freesareille ja finiireille	100 %	5 min	Heti käytön jälkeen	Sisältää korroosionestoainetta. Pyörivien instrumenttien desinfiointioon suositellaan käytettäväksi ultraäänilaitetta.
Muut merkinnät								

*TbB 3 % 60 min, TbB 4 % 30 min.

Tutustu kaikkien tuotteiden käyttöohjeisiin huolella. Hygieniaohjeistus on suuntaa antava. Vastaanotto on vastuussa hyväksyttävän ja riittävän hygieniakäytännön toteutuksesta.

Päiväys _____

Hygienia vastaava _____